



Bedienungsanleitung Agilo Sitzsystem



© 2020 Scout Mobility BV

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Scout Mobility BV dürfen die zur Verfügung gestellten Informationen in keiner Weise und auf keine Art (elektronisch oder mechanisch) vervielfältigt bzw. verbreitet werden.

Den zur Verfügung gestellten Informationen liegen allgemeine Angaben zu den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Konstruktionen zu Grunde. Da Scout Mobility BV eine Politik der ständigen Produktverbesserung verfolgt, sind Änderungen vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten für die Standardausführung des Produkts. Für eventuelle Schäden, die Ihnen entstehen, weil die Spezifikationen des an Sie gelieferten Produkts von denen der Standardausführung abweichen, kann Scout Mobility BV nicht haftbar gemacht werden.

Die zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit aller erdenklicher Sorgfalt zusammengestellt. Scout Mobility BV haftet jedoch nicht für eventuelle Fehler in den Informationen oder daraus resultierenden Folgen.

Für Schäden, die durch von Dritten ausgeführte Arbeiten entstehen, haftet Scout Mobility BV nicht.

Die von Scout Mobility BV verwendeten Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Handelsmarken usw. dürfen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Handelsmarken nicht als frei betrachtet werden.

Diese Bedienungsanleitung steht in vergrößerbarer Version auf unserer Webseite zur Verfügung.

1	Vorwort	4
	Über diese Anleitung.....	4
	CE-Erklärung	4
	Garantiebestimmungen.....	4
2	Allgemeine Beschreibung	4
2.1	Beschreibung Agilo	4
3	Allgemeine Handlungen	5
3.1	Sitzkissen: abnehmen/wieder einrichten	5
3.2	Rückenlehne: abnehmen/wieder einrichten	5
3.3	Beinstützen: abnehmen/wieder einrichten	6
3.4	Armlehnen: abnehmen/wieder einrichten.....	6
3.5	Rückenlehne (Rahmen): herunter klappen	6
3.6	Kopfstütze	6
4	Einstellmöglichkeiten	8
4.1	Sitztiefe einstellen	8
4.2	Sitzbreite einstellen	9
4.3	Rückenwinkel einstellen.....	9
4.4	Beinstützen einstellen	10
4.5	Armlehnen einstellen.....	12
4.6	Kopfstütze	14
4.7	Hüftgurt	15
5	Verstellmöglichkeiten	16
5.1	Komfort-Beinstützen	16
5.2	Kopfstütze mit Riegelverstellung	16
5.3	Seitenprofile	16
6	Einsteigen in den Rollstuhl und Aussteigen aus dem Rollstuhl (Transfer)...	17
7	Verkleinern des Rollstuhls	18
8	Wartung	18
8.1	Wartungstabelle	18
8.2	Polsterung reinigen	18

1 Vorwort

Über diese Anleitung

Die Bedienungsanleitung für diesen Elektrorollstuhl setzt sich aus drei Heften zusammen. Lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Produkts gut durch. Ihr Inhalt ist sehr wichtig für die sichere Benutzung und die richtige Wartung (Reinigung) des Rollstuhls.

- Die allgemeine Bedienungsanleitung
 - Die Anleitung für das Sitzsystem (AGILO) (dieses Heft)
 - Die Anleitung für die Steuerung
- Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn eine von diesen Anleitungen mit Ihrem Rollstuhl nicht mitgeliefert wurde. Für Händler ist neben dieser Bedienungsanleitung auch ein Service-Handbuch erhältlich.

Diese AGILO-Anleitung verweist in gegebenen Fällen auf andere Anleitungen. Das geschieht auf folgende Weise:

W **ALLGEMEIN**

W **STEUERUNG**: Verweis auf Bedienungsanleitung der Steuerungen.



Befolgen Sie die Anweisungen mit einem Vorsicht-Piktogramm! Wenn die Anweisungen nicht mit der entsprechenden Vorsicht ausgeführt werden, können sie zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Produkts oder der Umwelt führen.

CE-Erklärung



Das Produkt entspricht den Rahmenbedingungen der Richtlinie für medizinische Dienstleistungen und trägt somit eine CE-Markierung.

Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen für das Sitzsystem sind identisch mit und aufgenommen in der Anleitung des Rollstuhls.

2 Allgemeine Beschreibung

2.1 Beschreibung Agilo

Auf dem Rollstuhl ist das AGILO Sitzsystem montiert. Das AGILO Sitzsystem bietet ausgezeichnete Unterstützung für Kopf, Rumpf, Arme und Beine. Eine gute Unterstützung des Körpers gewährleistet maximale Unabhängigkeit: der Benutzer kann möglichst viele Handlungen selbst ausführen.

Das Einstellen des Rollstuhls muss von einem für diesen Zweck geschulten Fachmann vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können sich negativ auf Ihre Sitzhaltung auswirken.



Benutzen Sie den Rollstuhl erst, nachdem Sie sich mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanleitung gründlich vertraut gemacht haben.

3 Allgemeine Handlungen

3.1 Sitzkissen: abnehmen / wieder montieren

abnehmen (Abb. 3.1)

1. Nehmen Sie den Sitz vom Stuhl, indem Sie ihn vorne nach oben ziehen.

wieder montieren (Abb. 3.2)

2. Rasten Sie den Sitz auf dem Sitzrahmen ein. Beachten Sie dabei die Hinterseite (1).

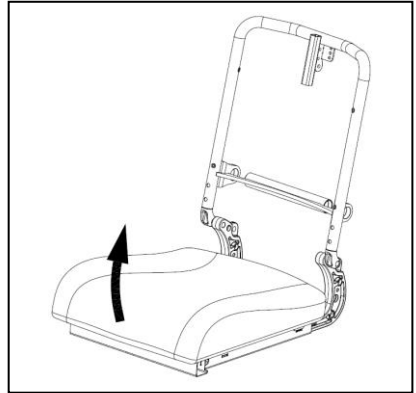


Abb. 3.1



Kontrollieren Sie, ob das Sitzkissen ordnungsgemäß mit einem Klick eingerastet ist.

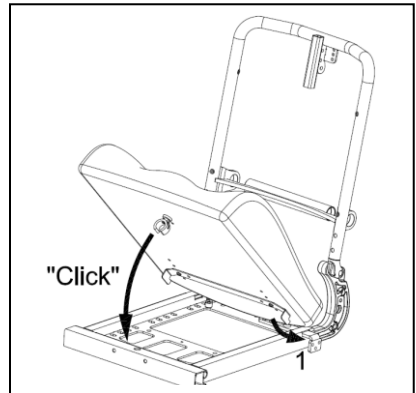


Abb. 3.2

3.2 Rückenlehne: abnehmen / wieder montieren

abnehmen (Abb. 3.3)

1. Lösen Sie die Schraube (1).
2. Nehmen Sie die Rückenlehne nach oben ab (2).

wieder montieren (Abb. 3.3)

3. Halten Sie die Rückenlehne gegen den Rahmen.
4. Schieben Sie die Rückenlehne nach unten an ihre Stelle.
5. Schraube (1) festziehen.

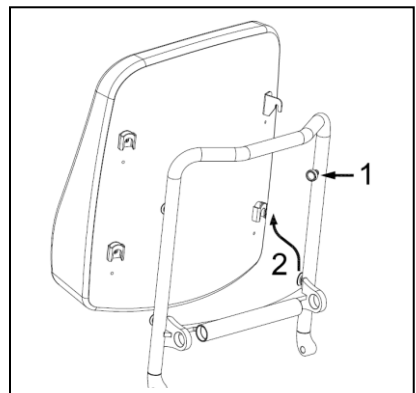


Abb. 3.3

3.3 Beinstützen: abnehmen / wieder montieren

abnehmen (Abb. 3.4)

1. Lösen Sie das Wadenband.
2. Drücken Sie die Klinke nach hinten, um die Beinstütze zu entriegeln.
3. Schwenken Sie die Beinstütze nach außen.
4. Nehmen Sie die Beinstütze nach oben aus dem Beinstützenhalter.

wieder montieren (Abb. 3.4)



Beim Wiedereinsetzen der Beinstütze müssen Sie ein Klicken hören. Nur dann ist die Beinstütze eingerastet.

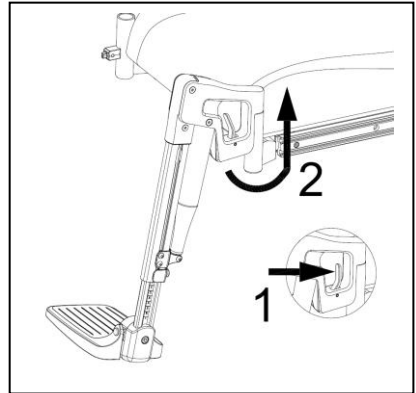


Abb. 3.4

3.4 Armlehnen: Abnehmen / wieder montieren

abnehmen (Abb. 3.5)

1. Drücken Sie die Klinke nach hinten, um die Armlehne zu entriegeln.

wieder montieren (Abb. 3.5)

2. Setzen Sie die Armlehne wieder in den Armlehnenhalter.
3. Verriegeln Sie die Armlehne durch die Bewegung der Klinke hin zur Armlehne in senkrechter Stellung.



Abb. 3.5

3.5 Rückenlehne (Rahmen): herunterklappen

1. Ziehen Sie den Quick Release Pin (1) aus der oberen Position (2) heraus (Abb. 3.6).
2. Klappen Sie die Rückenlehne (3) herunter (Abb. 3.6).

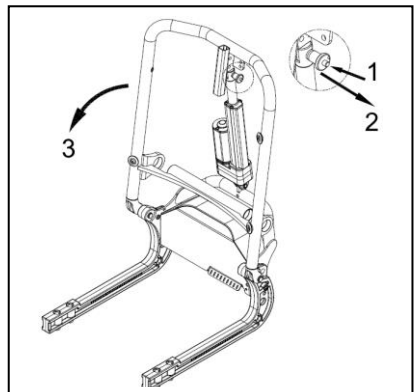


Abb. 3.6

3.6 Kopfstütze

abnehmen (Abb. 3.7)

1. Lösen Sie die Schraube (1) um die Kopfstütze zu entriegeln.
2. Nehmen Sie die Kopfstütze (2) ab.

wieder montieren (Abb. 3.7)

3. Stellen Sie die Kopfstütze wiederauf die gewünschte Höhe.
4. Ziehen Sie Schraube (1) wieder fest.

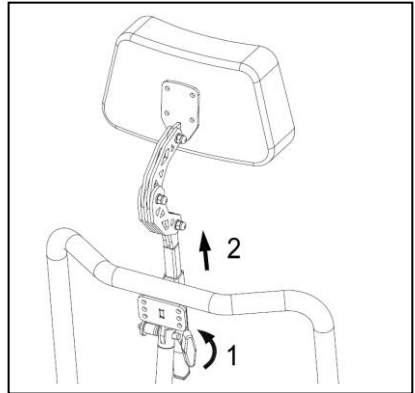


Abb. 3.7

4 Einstellmöglichkeiten

Zum Einstellen des Sitzsystems braucht man das nachfolgende Werkzeug:

- Schraubenschlüssel 13 mm
- Inbus-Schlüssel 4, 5 und 6 mm.

4.1 Sitztiefe einstellen

Sitztiefe mittels Rückenlehnenrohre einstellen (Abb. 4.1)

1. Lösen Sie die Bolzen an beiden Seiten des Sitzrahmens.
2. Schieben Sie die Rohre der Rückenlehne in die gewünschte Stellung.
3. Ziehen Sie die Bolzen fest.



Abb. 4.1

Sitztiefe mittels Sitzkissen einstellen (Abb. 4.2)

1. Nehmen Sie den Sitz vom Stuhl, indem Sie ihn nach oben ziehen (Abb. 3.1).
2. Bringen Sie die Klemmen an der richtigen Stelle (Abb. 4.2) an. Es gibt zwei mögliche Positionen.
3. Rasten Sie den Sitz auf dem Sitzrahmen (Abb. 3.2) ein.



Kontrollieren Sie, ob das Sitzkissen ordnungsgemäß mit einem Klick eingerastet ist.



Sorgen Sie dafür, dass zwischen Ihren Kniekehlen und der Vorderkante des Sitzes mindestens ein Zwischenraum von 2 cm besteht, damit Ihre Beine gut durchblutet werden.

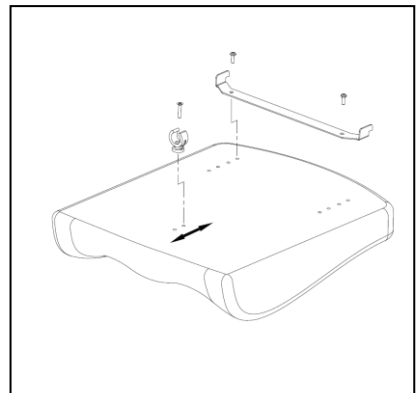


Abb. 4.2

4.2 Sitzbreite einstellen

Sitzbreite mittels Armlehnen einstellen (Abb. 4.3)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
2. Schieben Sie den Armlehenhalter (2) in die gewünschte Stellung.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.

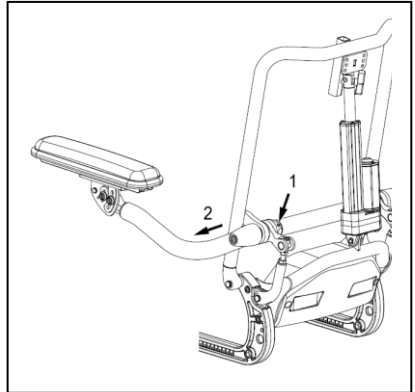


Abb. 4.3

Sitzbreite mittels Beinstützen einstellen (Abb. 4.4)

1. Lösen Sie die Schraube (1), aber nicht herausnehmen. Drücken Sie die Schraube nach innen, um die Blöcke zu lösen.
2. Schieben Sie den Beinstützhalter (2) in die gewünschte Stellung.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

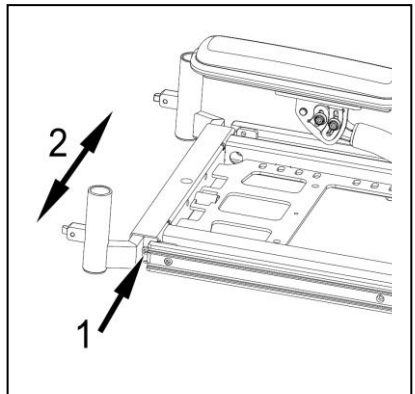


Abb. 4.4

4.3 Rückenwinkel einstellen

Siehe Abbildung 4.5.

1. Lösen Sie die Schraube (1) am Verstellrohr.
2. Stellen Sie den gewünschten Rückenwinkel ein (2).
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

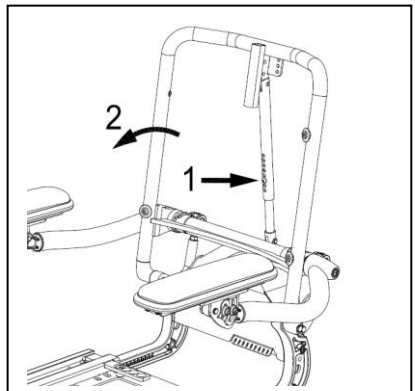


Abb. 4.5

4.4 Beinstützen einstellen

Unterschenkellänge einstellen (Abb. 4.6)

1. Lösen Sie die Schraube (1).
2. Schieben Sie die Fußstütze (2) in die gewünschte Stellung.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.



Achten Sie darauf, dass die Fußstütze weit genug über dem Boden ist, so dass Sie mit dem Rollstuhl über Hindernisse fahren können.

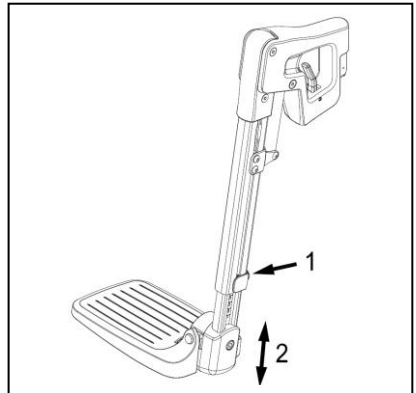


Abb. 4.6

Winkel der Fußstütze einstellen (Abb. 4.7)

1. Lösen Sie die Schraube.
2. Drehen Sie die Fußstütze in die gewünschte Stellung.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

Breite der Beinstützen (Abb. 4.4)

Siehe Kapitel 4.2.

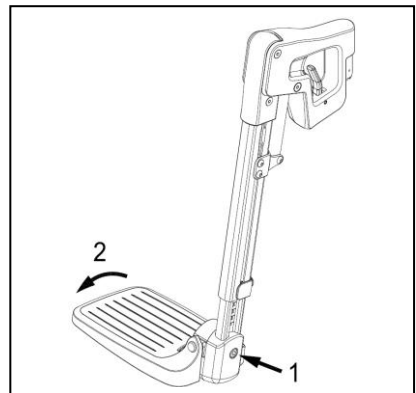


Abb. 4.7

Winkel der Beinstützen einstellen (Abb. 4.8)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
2. Bringen Sie die Beinstütze in den gewünschten Winkel (2).
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.

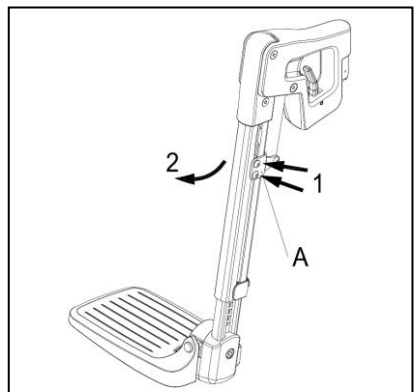


Abb. 4.8

Höhe der Unterschenkelplatte einstellen (Abb. 4.9)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
Bringen Sie die Unterschenkelplatte in die gewünschte Stellung (2).
2. Ziehen Sie die Schrauben fest.

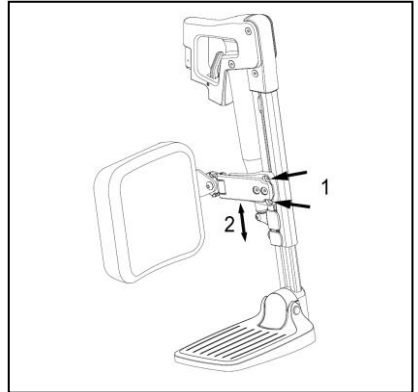


Abb. 4.9

Tiefe der Unterschenkelplatte einstellen (Abb. 4.10)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
2. Bringen Sie die Unterschenkelplatte in die gewünschte Stellung (2).
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.

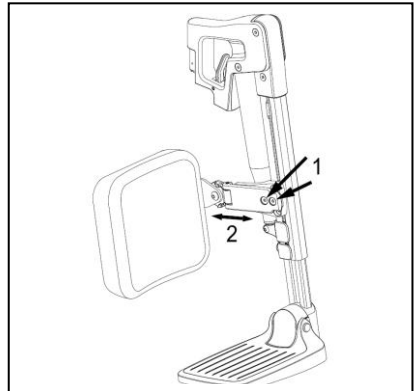


Abb. 4.10

4.5 Armlehnen einstellen

Höhe und Winkel der Armlehnen einstellen (Abb. 4.11)

1. Lösen Sie die Mutter (1).
2. Drehen Sie den Bolzen (2) bis die Armlehne in der gewünschten Position ist.
3. Ziehen Sie die Mutter (1) fest.
4. Lösen Sie die Schrauben (3).
5. Bringen Sie die Armlehne in den gewünschten Winkel.
6. Ziehen Sie die Schrauben fest.

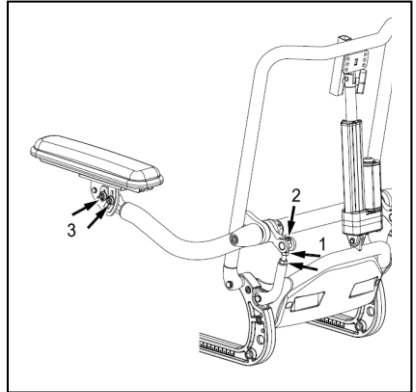


Abb. 4.11



Sorgen Sie dafür, dass die Arme gut unterstützt werden, ohne dass die Schultern nach oben gedrückt werden.

Tiefe der Armlehnen einstellen (Abb. 4.12)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
2. Schieben Sie die Armlehne in die gewünschte Stellung (2).
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

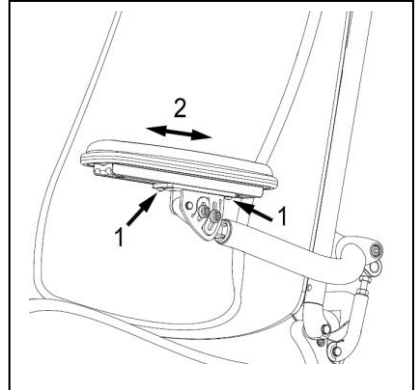


Abb. 4.12

Tiefe der Steuerung einstellen (Abb. 4.13)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
2. Schieben Sie die Steuerung in die gewünschte Stellung (2).
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

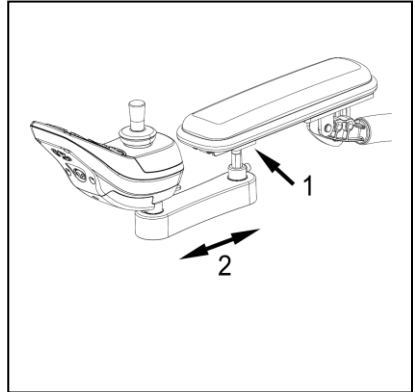


Abb. 4.13

Höhe der Steuerung einstellen (Abb. 4.14)

1. Lösen Sie die Schrauben (1).
2. Schieben Sie die Steuerung in die gewünschte Stellung (2).
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.

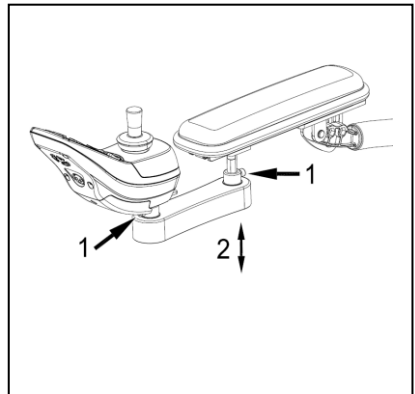


Abb. 4.14

4.6 Kopfstütze

Höhe (Abb. 4.15)

1. Lösen Sie die Klemmschraube (1) um die Kopfstütze zu entriegeln,
2. Wählen Sie die gewünschte Stellung (2)
3. Verriegeln Sie die Kopfstütze durch Festziehen der Klemmschraube.

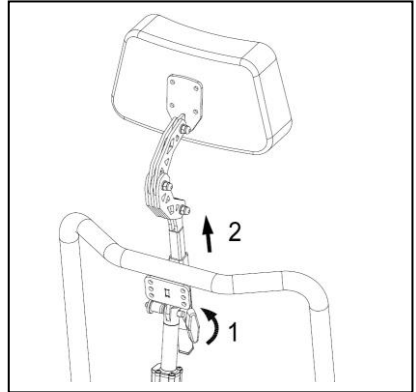


Abb. 4.15

Position (Abb. 4.16)

1. Lösen Sie die 3 Schrauben (1)
2. Stellen Sie die gewünschte Stellung ein (2).
3. Ziehen Sie die (3) Schrauben wieder gut fest.

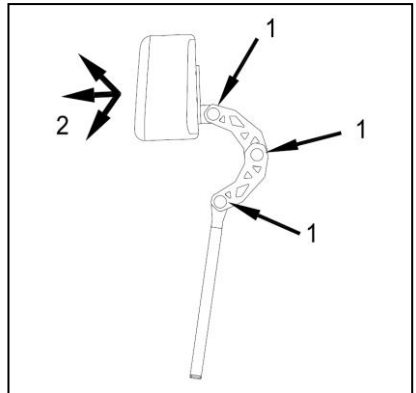


Abb. 4.16

4.7 Hüftgurt

Der Rollstuhl kann mit einem Hüftgurt ausgestattet werden. Der Hüftgurt verleiht zusätzliche Sitzstabilität während des normalen Gebrauchs. Dieser Gurt ist kein Sicherheitsgurt für den Transport.

Montieren Sie den Hüftgurt wie folgt (Abb. 4.18):

1. Befestigen Sie die Gurtschnalle an eine der zwei Stellen wie gezeigt.
2. Ziehen Sie den Gurt durch die Schnalle.

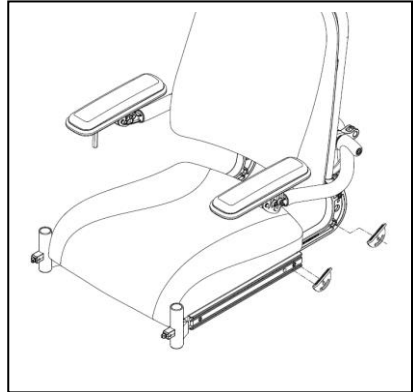


Abb. 4.18



- **Überprüfen Sie den korrekten Verlauf des angelegten Gurtes beim Rollstuhlnutzer. Der Gurt soll in einem Winkel von etwa 45° über dem Becken verlaufen (Abb. 4.19).**
- **Stellen Sie sicher, dass der Gurt sauber ist und der Verschlussmechanismus einwandfrei funktioniert. Der Gurt und das Gurtschloss können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.**
- **Ein zu hoch angelegter Gurt, z. B. Gurtverlauf über der Bauchdecke, kann eine falsche Sitzposition verursachen und es besteht die Gefahr, dass der Rollstuhlnutzer nach unten durchrutscht.**
- **Verwenden Sie den Hüftgurt nie als Sicherheitsgurt während des Transports.**

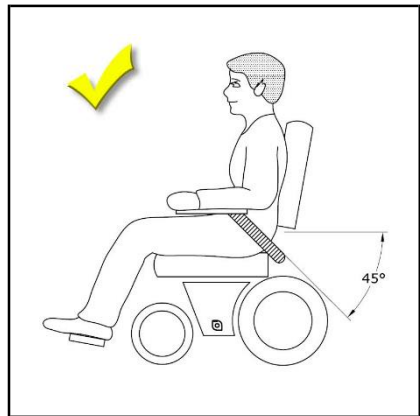


Abb. 4.19: Richtiger Gurtverlauf

5 Verstellmöglichkeiten

5.1 Komfort-Beinstützen

Kniewinkel (Abb. 5.1)

Der Winkel der Komfort-Beinstützen lässt sich unabhängig voneinander einstellen.

1. Drücken Sie den Hebel (1) nach vorn.
2. Heben Sie Ihre Beine (2) leicht an.
3. Lassen Sie den Hebel an der gewünschten Stelle los.

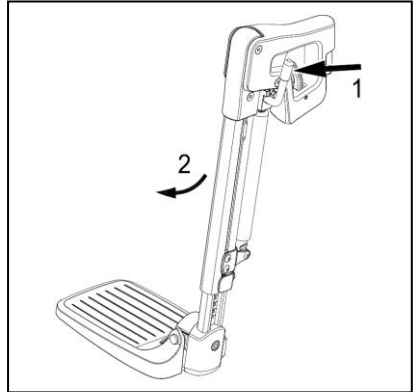


Abb. 5.1

5.2 Kopfstütze mit Riegelverstellung

Position (Abb. 5.2)

1. Lösen Sie die 3 Klemmschrauben.
2. Wählen Sie die gewünschte Stellung.
3. Ziehen Sie die Klemmschrauben wieder fest.

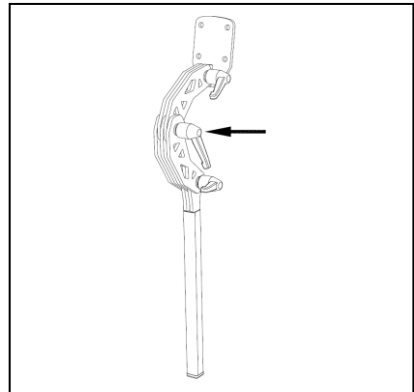


Abb. 5.2

5.3 Seitenprofile

Breite (Abb. 5.3).

1. Nehmen Sie das Sitzkissen ab.
2. Entfernen Sie die Senkschraube hinten und lösen Sie die vordere Schraube (1).
3. Bringen Sie das Profil in die gewünschte Breite (2).
4. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

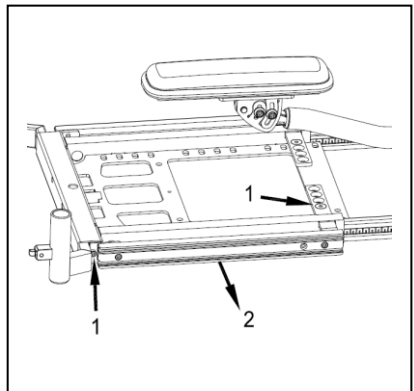


Abb. 5.3

6 Einsteigen in den Rollstuhl und Aussteigen aus dem Rollstuhl (Transfer)



Stellen Sie sich nicht auf die Fußrasten. Sie sind nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht von einer Person zu tragen. Außerdem kann dadurch der Rollstuhl umkippen.

Vorwärtstransfer

1. Klappen Sie die Fußrasten nach oben (Bild 6.1).
2. Klappen Sie die Unterschenkelplatten (sofern zutreffend) zur Seite weg (Abb. 6.1).
3. Drehen Sie nach Möglichkeit die Beinstützen zur Seite weg (Abb. 6.2).
4. Nehmen Sie im Stuhl Platz.

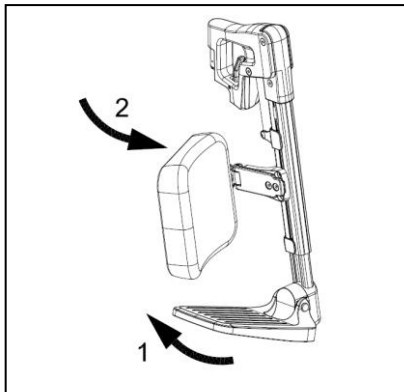


Abb. 6.1

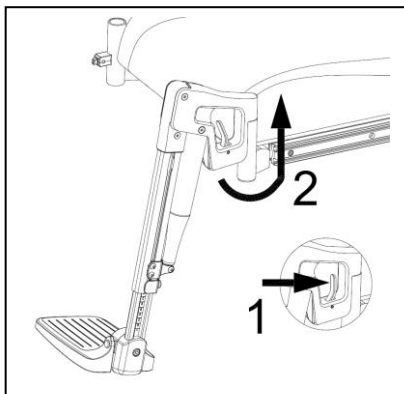


Abb. 6.2

Seitlicher Transfer

1. Klappen Sie die Armlehnen nach hinten hoch (Abb. 6.3).
2. Nehmen Sie im Stuhl Platz.

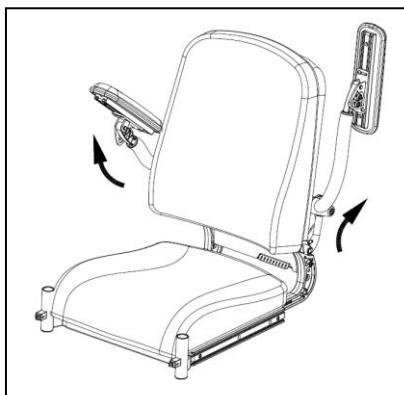


Abb. 6.3

7 Verkleinern des Rollstuhls

Für den Transport ohne Insassen kann der Rollstuhl verkleinert werden. Komponenten, die einfach vom Rollstuhl gelöst werden können, müssen entfernt werden. Bewahren Sie diese an einem geeigneten Ort auf. Ist der Laderaum des Fahrzeugs niedrig, dann besteht die Möglichkeit, die Rückenlehne herunterzuklappen.

1. Nehmen Sie das Sitzkissen ab. siehe Kapitel 3.
2. Nehmen Sie die Rückenlehne ab. siehe Kapitel 3.
3. Nehmen Sie die Beinstützen ab. siehe Kapitel 3.
4. Nehmen Sie die Kopfstütze ab. siehe Kapitel 3.
5. Klappen Sie den Rahmen der Rückenlehne herunter. siehe Kapitel 3.

8 Wartung

8.1 Wartungstabelle

Es empfiehlt sich, den Rollstuhl einmal jährlich oder, bei intensiver Benutzung, alle sechs Monate von Ihrem Händler kontrollieren zu lassen. Die untenstehende Tabelle zeigt die Wartungsarbeiten, die Sie selbst ausführen können.

Zeit	Beschreibung
Monatlich	Polsterung reinigen, sofern erforderlich. Siehe 8.2.

8.2 Polsterung reinigen

Reinigen Sie die Polsterung mit einem feuchten Lappen und Kernseife. Wischen Sie nach dem Entfernen des Schmutzes die Polsterung mit einem trockenen weichen Lappen trocken.



Benutzen Sie keine organischen Lösungsmittel wie Verdünnungsmittel, Waschbenzin oder Terpentin.



Reinigen Sie die Polsterung nicht chemisch. Bügeln oder Schleudern Sie die Polsterung nicht



Scout Mobility B.V.
Kanaalstraat 101D
5711 EG Someren
The Netherlands

T +31(0)6 22 15 21 83
info@scoutmobility.com
www.scoutmobility.com

Vertrieb in Deutschland

[Reha-Med Hilfsmittel GmbH](http://Reha-Med-Hilfsmittel-GmbH)
Eichwaldstraße 9
44319 Dortmund
Tel. + 49 (0)231 / 51 91 61 54
kundenservice@rehamedpower.de
www.rehamedpower.de