



Parts

X10

X10-S

X10 Junior



Richtlinien und nützliche Informationen für die Wartung

Servicetechniker

Die Wartung (regelmäßige Wartung und Reparatur) des Rollstuhls darf nur von Servicetechnikern durchgeführt werden, die von Scout Mobility BV geschult und autorisiert wurden. Zeitarbeiter und Mitarbeiter in Ausbildung dürfen diese Arbeiten ausführen, jedoch nur unter Aufsicht eines autorisierten Servicetechnikers.

Sicheres Arbeiten

Achten Sie immer darauf, dass Sie sicher arbeiten, insbesondere wenn Sie den Rollstuhl anheben müssen. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sind Sie jederzeit für die Einhaltung der vor Ort geltenden Richtlinien und Normen in Bezug auf Sicherheit und Umwelt verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unserer Serviceabteilung in Verbindung zu setzen, bevor Sie Reparaturen an einem verunfallten Rollstuhl durchführen.

Wir empfehlen Ihnen, den Rollstuhl von der Batterie zu trennen, wenn der Rollstuhl aufgrund eines Fehlers repariert werden muss. Entfernen Sie die Hauptsicherung(en), während der Rollstuhl unbeaufsichtigt ist.

Service und technischer Support

Die originalen Rollstuhleinstellungen sind bei Scout Mobility hinterlegt und können Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Für Informationen zu Einstellungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben:

- Type
- Seriennummer
- Jahr-Monat der Herstellung

Diese Informationen sind auf dem Typenschild des Rollstuhls aufgedruckt.

So bestellen Sie Ersatzteile

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, geben Sie bitte an:

- Seriennummer
- Teilenummer
- Anzahl der benötigten Teile
- Beschreibung (in der jeweiligen Sprache)
- Abmessungen (falls zutreffend)

Bitte senden Sie Ihre Bestellungen per E-Mail an kundenservice@rehamedpower.de.

Bemerkungen:

- Teile, die keine Positionsnummer haben, können nicht separat bestellt werden. Solche Teile gehören zu einer Baugruppe, die in einem Stück bestellt und ausgetauscht werden muss.
- Eingerahmte Positionsnummern beziehen sich auf die entsprechende Zeichnung.

Beseitigung

Behandeln Sie Abfallstoffe immer gemäß den örtlichen Vorschriften.

Contact Information Scout Mobility BV

Scout Mobility BV
Tiendschuur 5
5768 SB Meijel
The Netherlands




Contact Information Reha-Med Hilfsmittel GmbH


Adresse:
Reha-Med Hilfsmittel GmbH
Europaplatz 1
44269 Dortmund
Tel : +49 (0)231 51 91 61 52
Fax : +49 (0)231 51 91 61 54

Lieferadresse:
Reha-Med Hilfsmittel GmbH
Scharnhorststr. 20
59755 Arnsberg

kundenservice@rehamedpower.de
www.rehamedpower.de

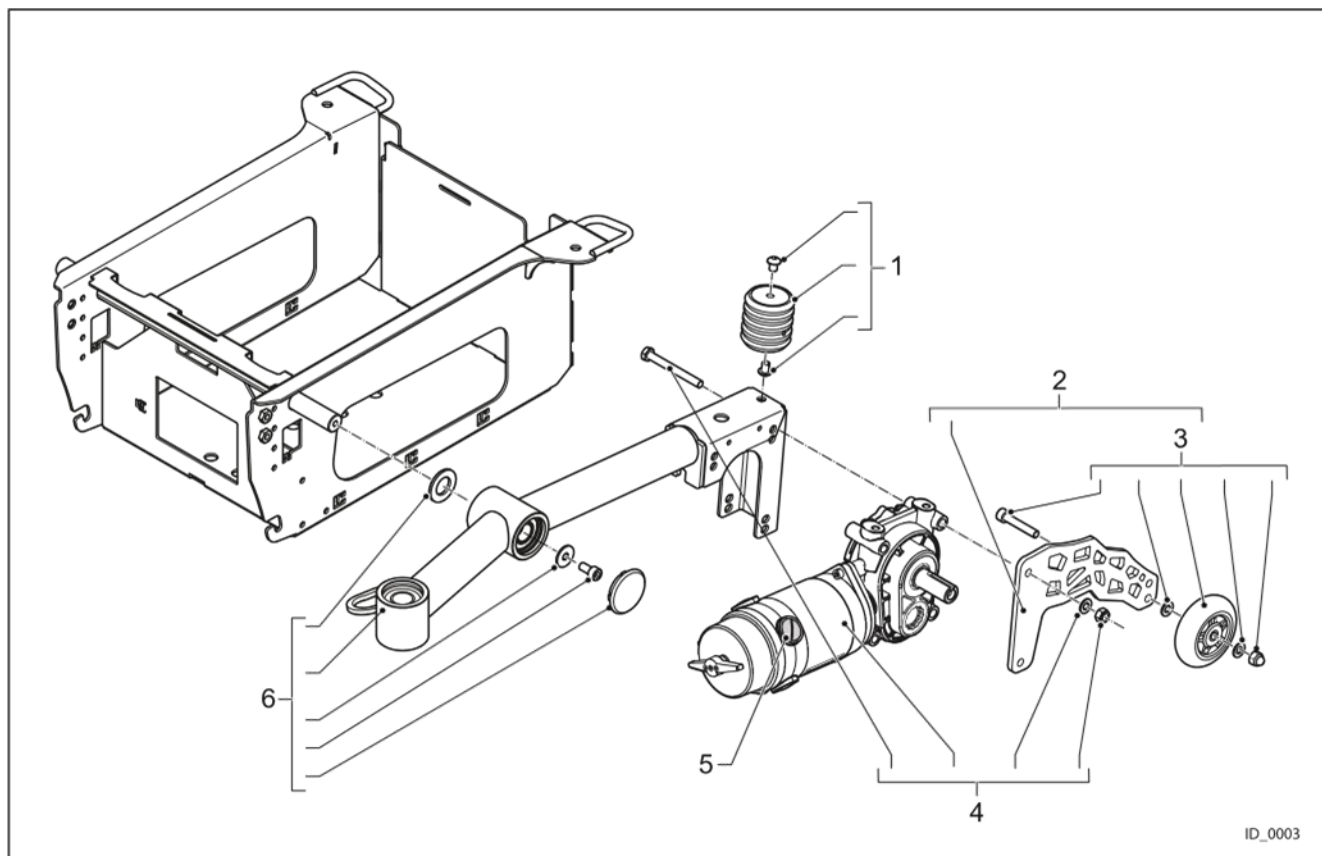
001-01-X10
Motorarm-Motors RWD


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0035	Federungs Polymer 45 ° Shore A.(standard)
2	22X0037	Antikipp Bracket inkl. Antikippgrad
3	22X0030	Antikippgrad (X10) - Schwenkgrad (Warrior)
4	22X0001-6-R	Antriebsmotor 6 - 10 km/h, (FWD rechts) (MWD/RWD links)
4	22X0001-6-L	Antriebsmotor 6 - 10 km/h, (FWD links) (MWD/RWD rechts)
4	22X0002-14-L	Antriebsmotor 14,5 km/h, (FWD/Warrior links) (MWD/RWD rechts)
4	22X0002-14-R	Antriebsmotor 14,5 km/h, (FWD/Warrior rechts) (MWD/RWD links)
5	22X0038	Kohlebürsten Set, 5mm (4x Inkl. 4x Abdeckungsschrauben)
6	22X0041L-DG	Seitenrahmen, RWD, links, dark grey
6	22X0041-R-DG	Seitenrahmen, RWD, rechts, dark grey
6	22X0041-L-LG	Seitenrahmen, RWD, links, light grey
6	22X0041-R-LG	Seitenrahmen, RWD, rechts, light grey
6	22X0041-L-B	Seitenrahmen, RWD, links, blue
6	22X0041-R-B	Seitenrahmen, RWD, rechts, blue
6	22X0041-L-R	Seitenrahmen, RWD, links, red
6	22X0041-R-R	Seitenrahmen, RWD, rechts, red

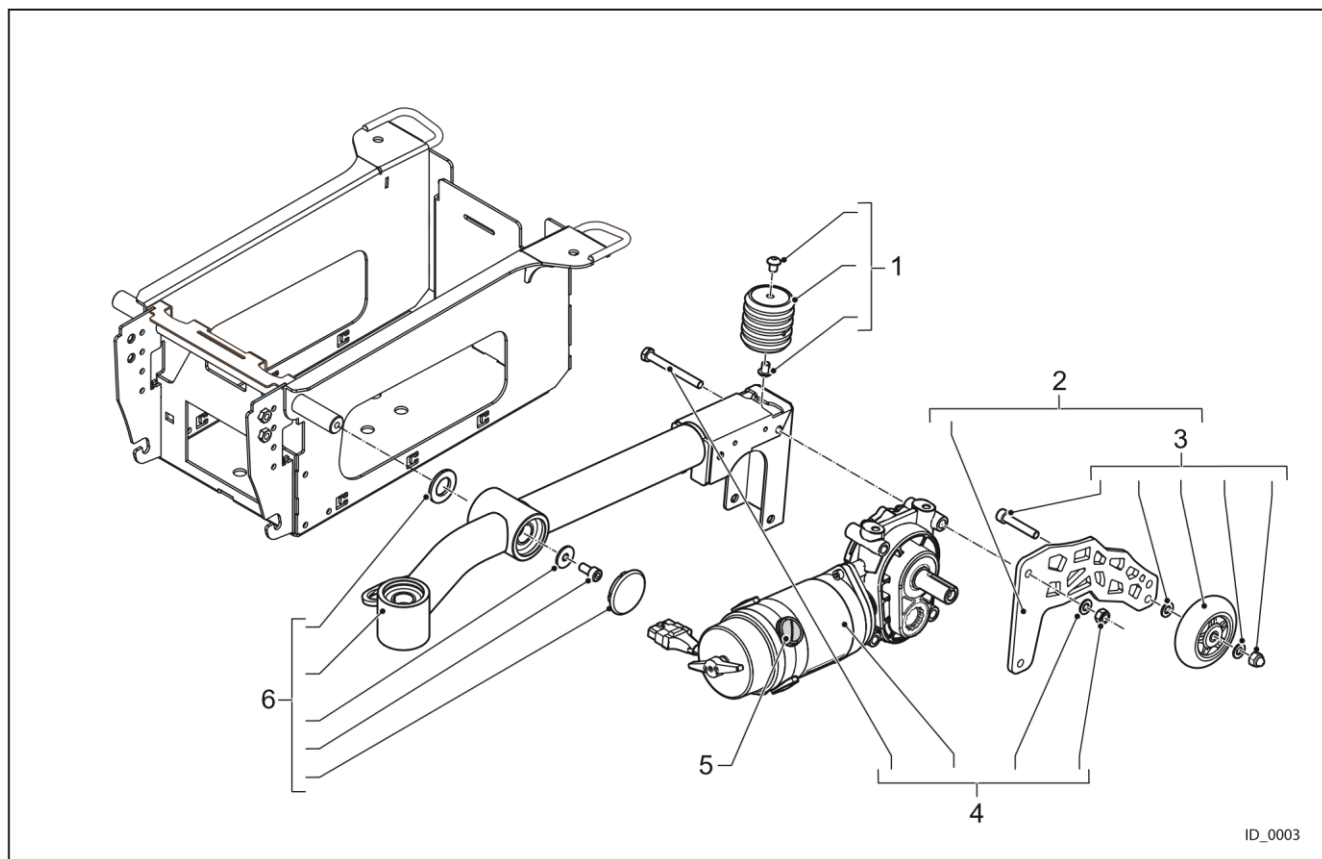

ID_0003

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0035-2	Federungs Polymer MK2 45 ° Shore A.(standard)
2	22X0037	Antikipp Bracket inkl. Antikippgrad
3	22X0030	Antikippgrad (X10) - Schwenkrad (Warrior)
4	22X0001-6-R	Antriebsmotor 6 - 10 km/h, (FWD rechts) (MWD/RWD links)
4	22X0001-6-L	Antriebsmotor 6 - 10 km/h, (FWD links) (MWD/RWD rechts)
4	22X0002-14-L	Antriebsmotor 14,5 km/h, (FWD/Warrior links) (MWD/RWD rechts)
4	22X0002-14-R	Antriebsmotor 14,5 km/h, (FWD/Warrior rechts) (MWD/RWD links)
5	22X0038	Kohlebürsten Set, 5mm (4x Inkl. 4x Abdeckungsschrauben)
6	22X0040-L-DG	Seitenrahmen, FWD, links, dark grey
6	22X0040-R-DG	Seitenrahmen, FWD, rechts, dark grey
6	22X0040-L-LG	Seitenrahmen, FWD, links, light grey
6	22X0040-R-LG	Seitenrahmen, FWD, rechts, light grey
6	22X0040-L-B	Seitenrahmen, FWD, links, blue
6	22X0040-R-B	Seitenrahmen, FWD, rechts, blue
6	22X0040-L-R	Seitenrahmen, FWD, links, red
6	22X0040-R-R	Seitenrahmen, FWD, rechts, red

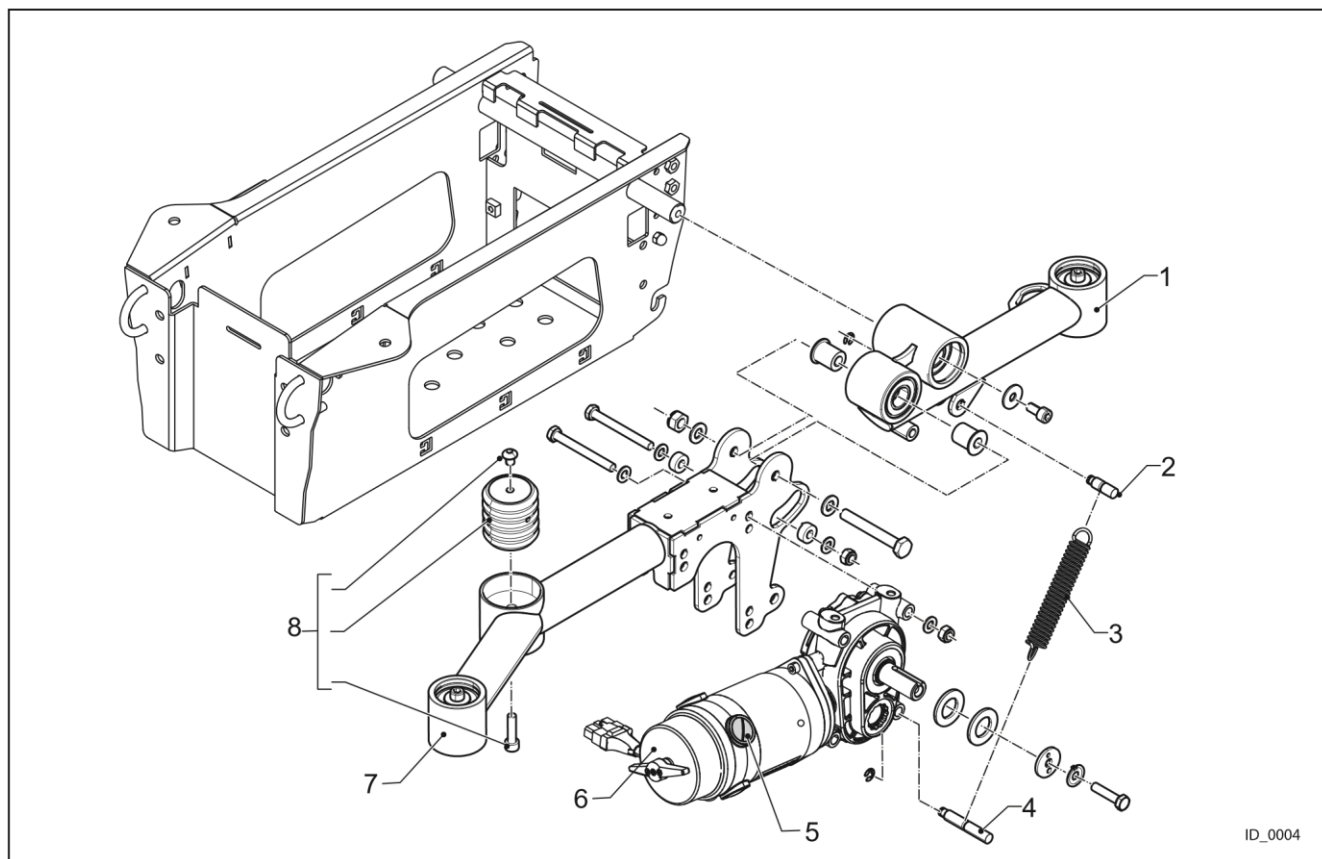


ID_0004


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0130-L-DG	Schwinge MWD, hinten links, dark grey
1	22X0130-R-DG	Schwinge MWD, hinten rechts, dark grey
1	22X0130-L-LG	Schwinge MWD, hinten links, light grey
1	22X0130-R-LG	Schwinge MWD, hinten rechts, light grey
1	22X0130-L-R	Schwinge MWD, hinten links, red
1	22X0130-R-R	Schwinge MWD, hinten rechts, red
1	22X0130-L-B	Schwinge MWD, hinten links, blue
1	22X0130-R-B	Schwinge MWD, hinten rechts, blue
2	22X0131	Federhalterachse oben
3	22X0133	Spannfeder Schwinge MWD
4	22X0132	Federhalterachse unten
5	22X0038	Kohlebürsten Set, 5mm (4x Inkl. 4x Abdeckungsschrauben)
6	22X0001-6-R	Antriebsmotor 6 - 10 km/h, (FWD rechts) (MWD/RWD links)
6	22X0001-6-L	Antriebsmotor 6 - 10 km/h, (FWD links) (MWD/RWD rechts)
6	22X0002-14-L	Antriebsmotor 14,5 km/h, (FWD/Warrior links) (MWD/RWD rechts)
6	22X0002-14-R	Antriebsmotor 14,5 km/h, (FWD/Warrior rechts) (MWD/RWD links)
7	22X0039-L-DG	Seitenrahmen, MWD links, dark grey

001-03-X10 -

Motor Arms MWD

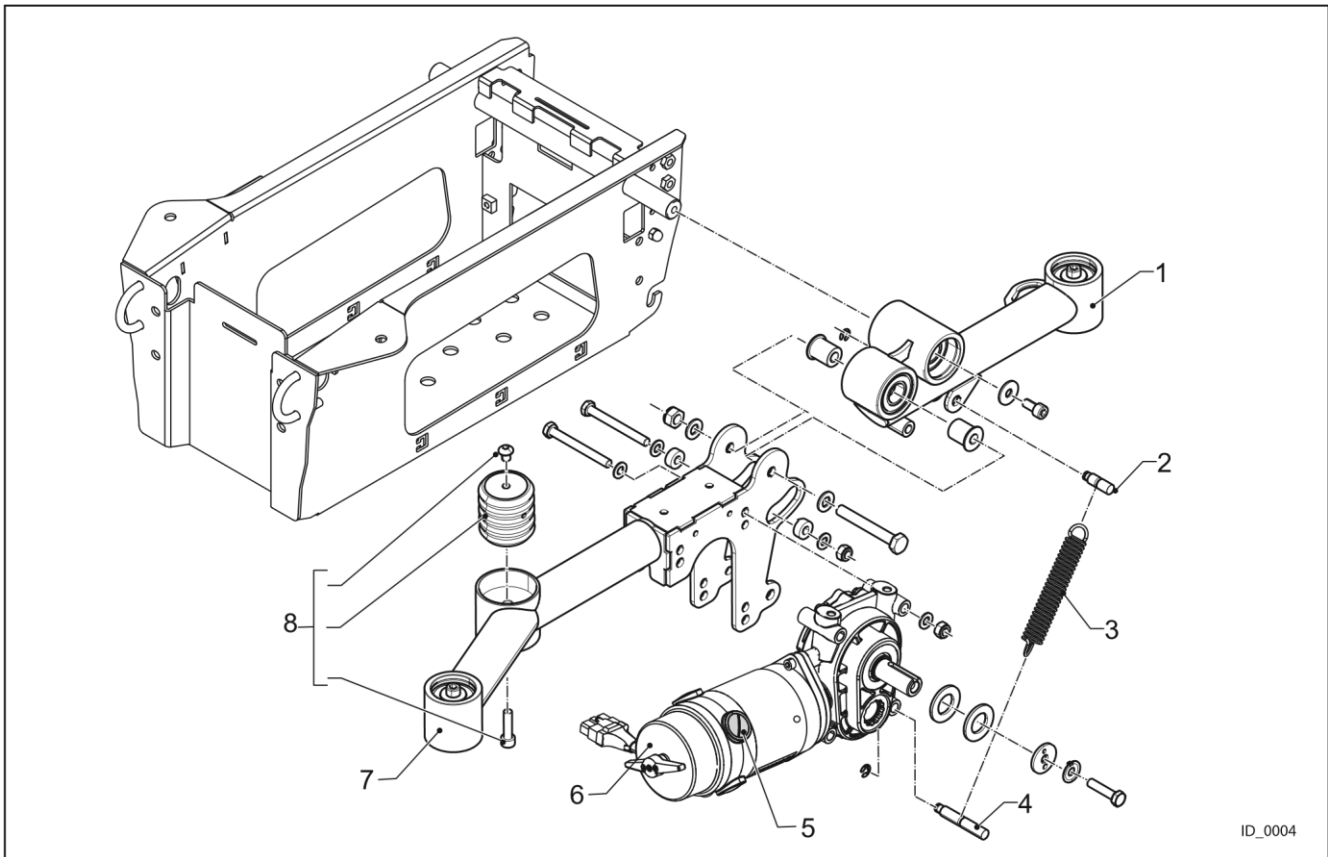


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
7	22X0039-R-DG	Seitenrahmen, MWD rechts, dark grey
7	22X0039-L-LG	Seitenrahmen, MWD links, light grey
7	22X0039-R-LG	Seitenrahmen, MWD rechts, light grey
7	22X0039-L-R	Seitenrahmen, MWD links, light grey
7	22X0039-R-R	Seitenrahmen, MWD rechts, red
7	22X0039-L-B	Seitenrahmen, MWD links, blue
7	22X0039-R-B	Seitenrahmen, MWD rechts, blue
8	22X0035-2	Federungs Polymer MK2 45 ° Shore A.(standard)

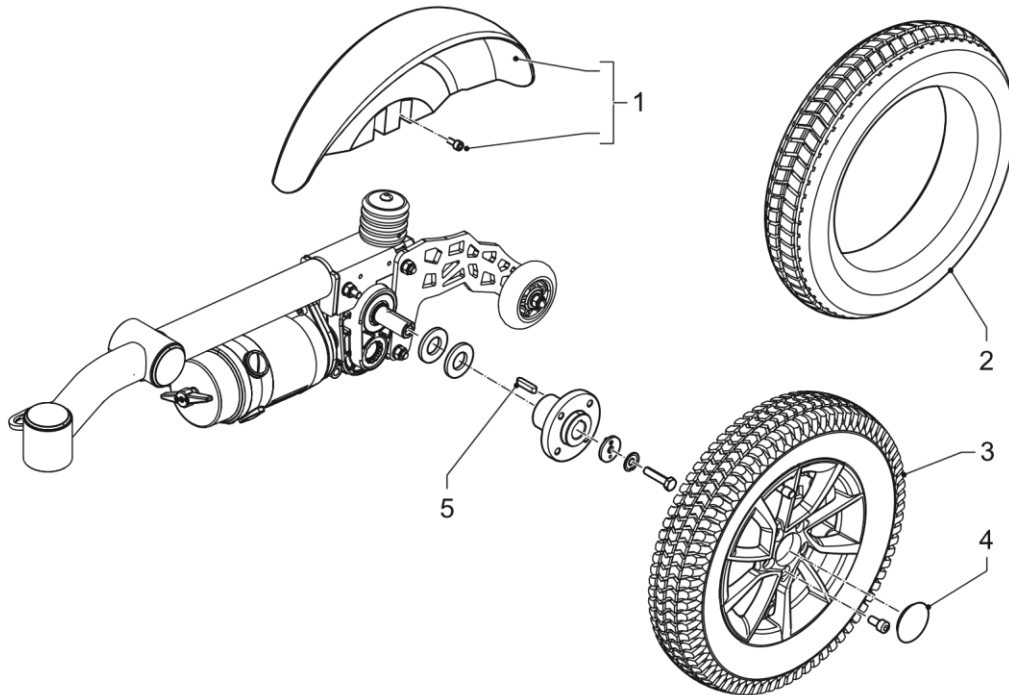001-04-X10 Drive-Wheels-Mudguards


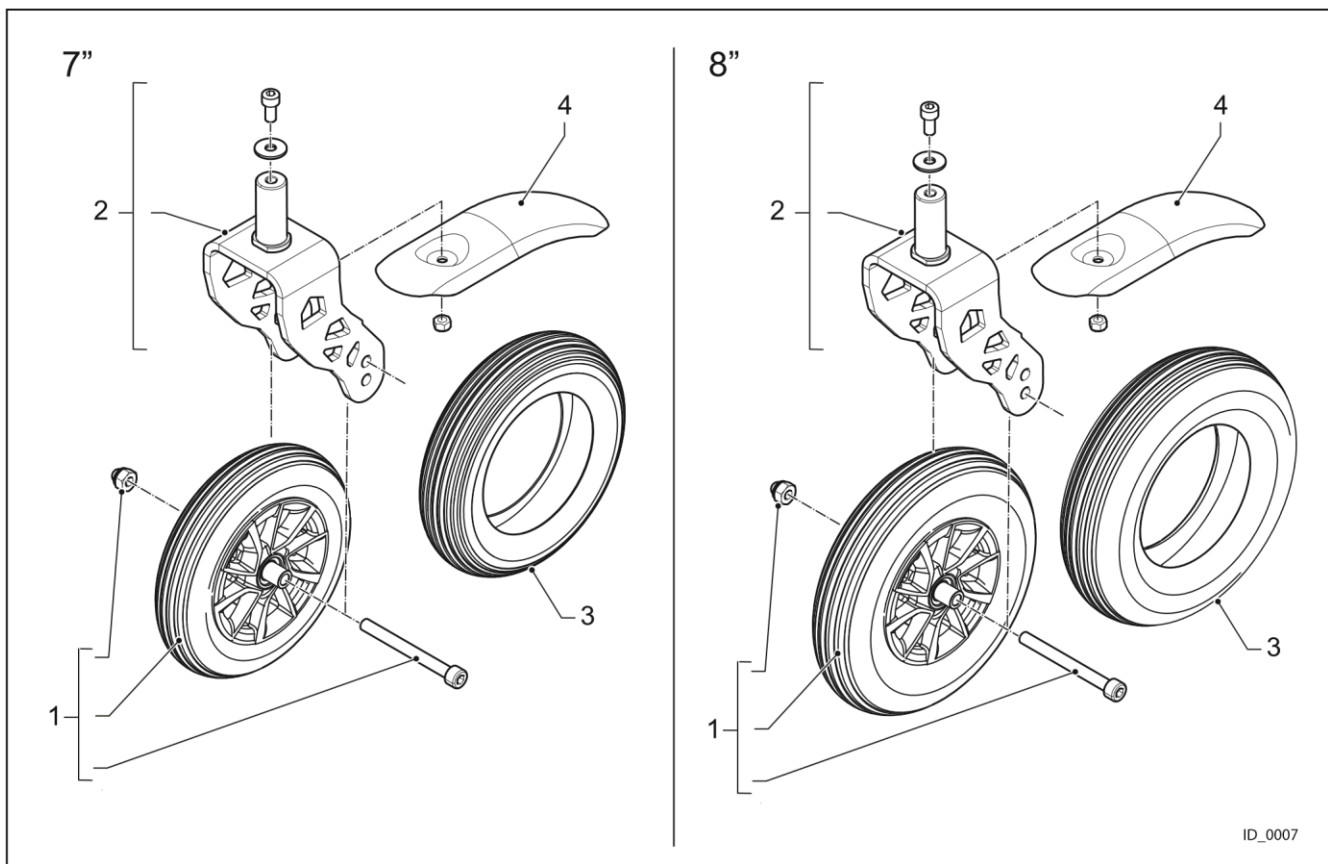
ID_0005

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0023	Radabdeckung Antriebsrad, pro Stück
2	22X0013	Decke 3,00x8, Luftbereifung, schwarz
2	22X0020	PU-Bereifung 3.00x8, schwarz
3	22X0009-LU	Felge 3.00-8, inkl. Luftbereifung
3	22X0009-PU	Felge 3.00-8, inkl. PU Bereifung
4	22X0026	Radkappe
5	22X0173	Splint, Antriebsrad


001-05-X10 Castor-Wheels-Mudguards

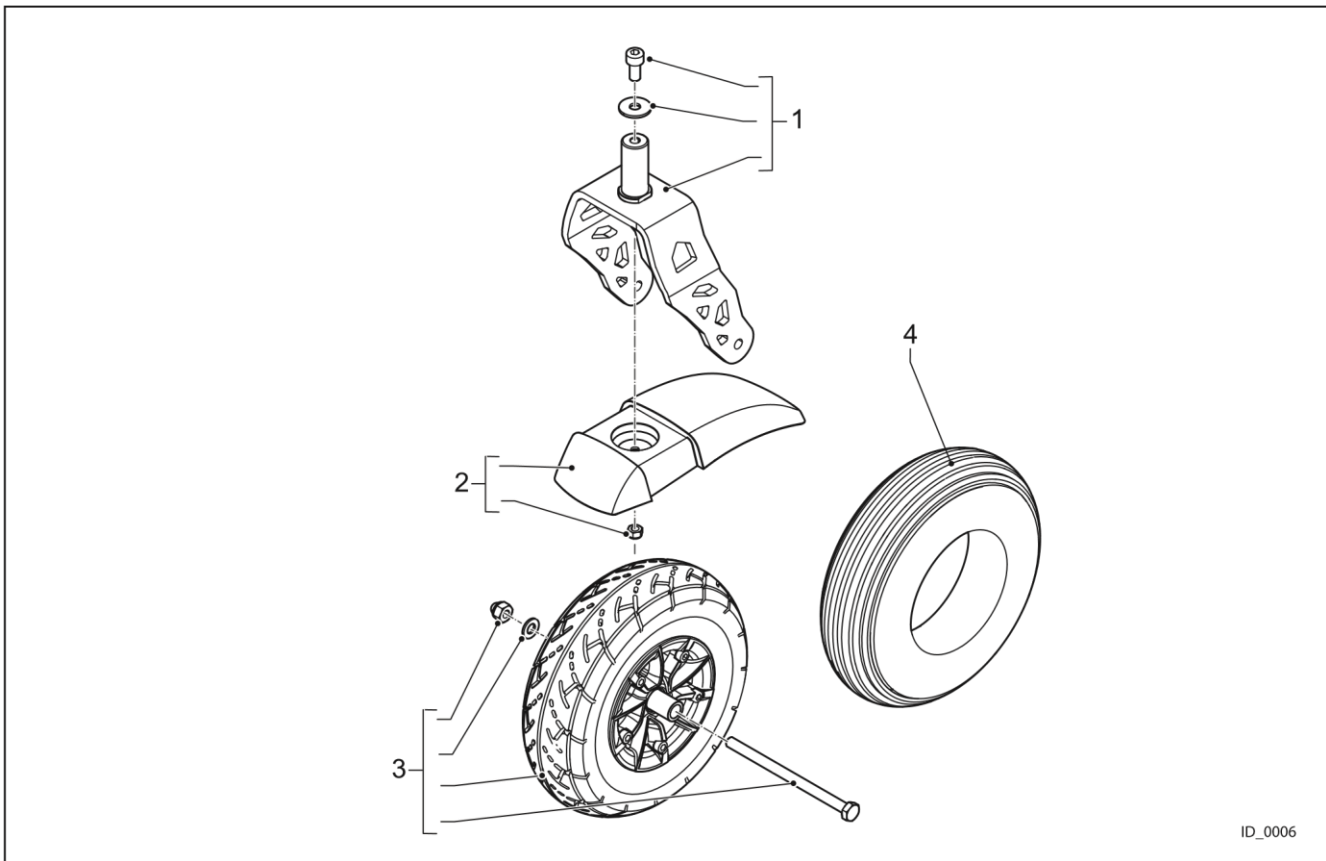


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0021	Radgabel 9" (FWD & RWD)
2	22X0024	Radabdeckung 9" Schwenkrad (pro Stück) (FWD & RWD)
3	22X0010-LU	Felge 9", inkl. Luftbereifung (FWD/RWD)
3	22X0010-PU	Felge 9", inkl. PU Bereifung (FWD/RWD)
4	22X0016	Decke 9", 2.80/2.50x4, (FWD & RWD), schwarz
4	22X0018	PU-Bereifung 9", 2.80/2.50 x 4, schwarz

001-06-X10 Castor Wheels and Forks MWD and FWD


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0011-PU	Felge 8", inkl. PU Bereifung (MWD vorne, FWD hinten)
1	22X0012-PU	Felge 7", inkl. PU Bereifung (MWD hinten)
2	22X0022	Radgabel 7" und 8" (MWD)
3	22X0019-8	PU Bereifung, 8"
3	22X0019-7	PU Bereifung, 7" (MWD hinten)
4	22X0025	Radabdeckung 7" / 8" Schwenkrad (pro Stück)

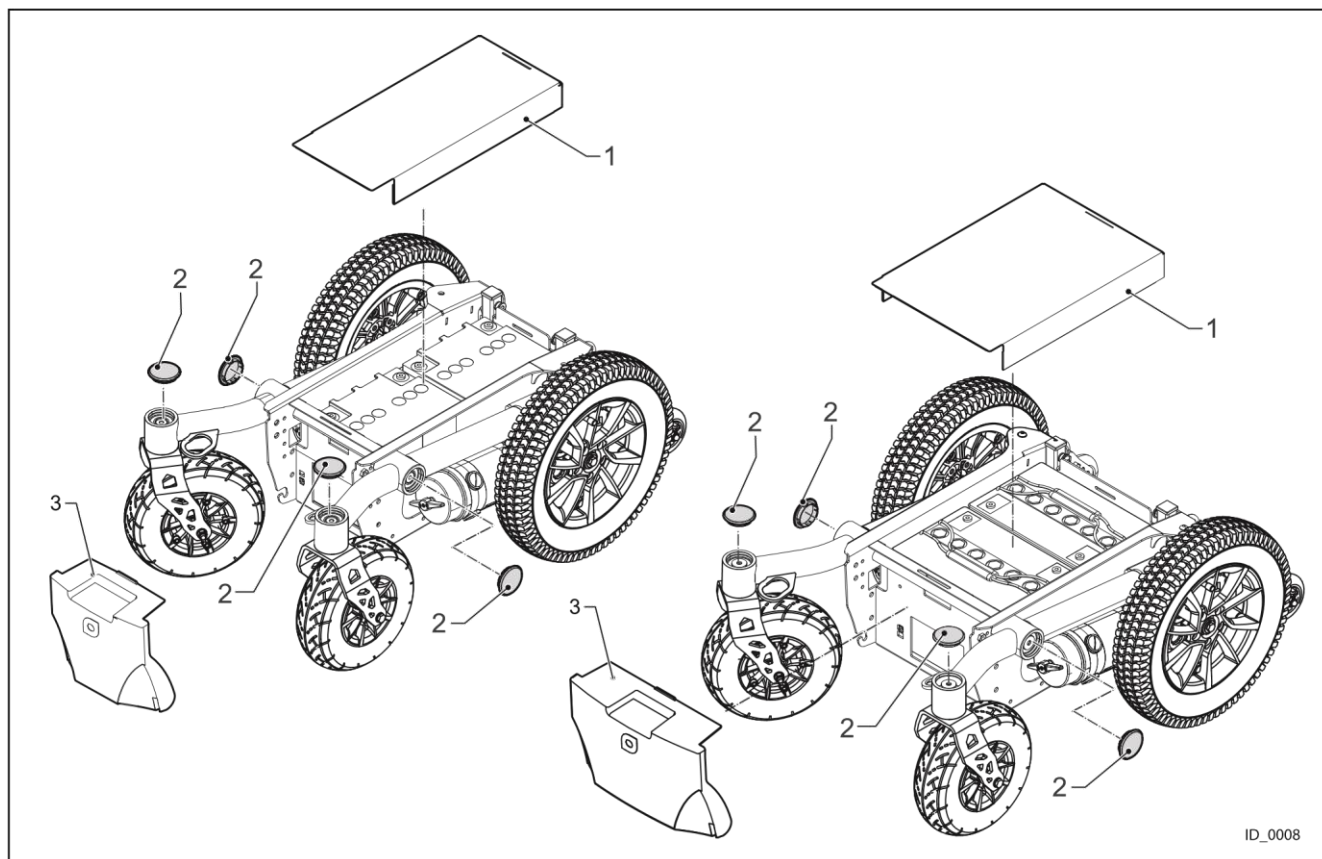

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0008-CC	Batterieabdeckung Compact Chassis
1	22X0008-SC	Batterieabdeckung Standard Chassis
2	22X0027	Lager Abdeckung, schwarz
3	22X0154-C	Bekappung Power Modul Compact Chassis
3	22X0154-S	Bekappung Power Modul Standard Chassis

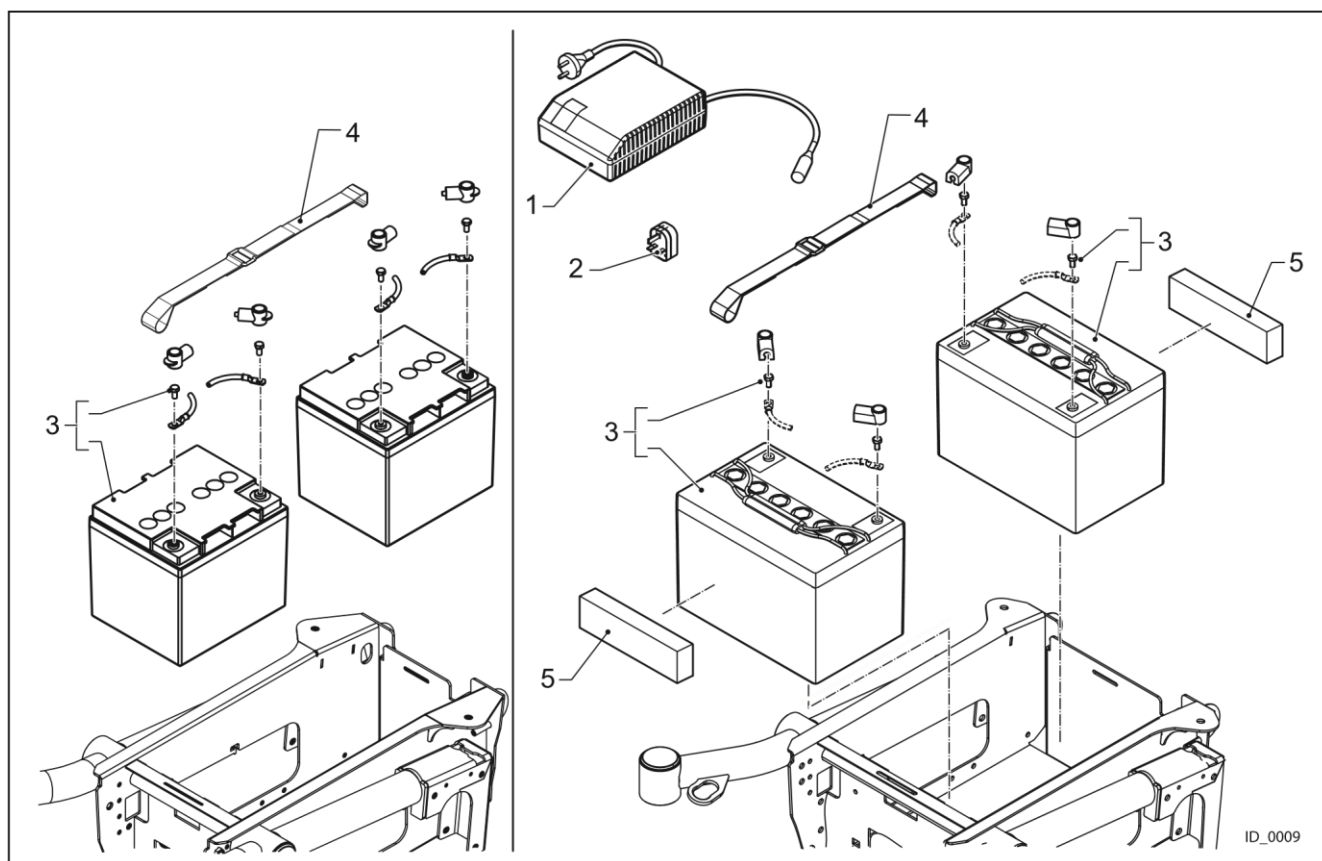


ID_0009

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0004-6	Batterie Ladegerät 24V, 6A
1	22X0004-8	Batterie Ladegerät 24V, 8A
1	22X0004-10	Batterie Ladegerät 24V, 10A
1	22X0004-10-LB	Batterie Ladegerät 24V, 10A für Lithium Batterien
3	22X0003-50	Batterie 50 Ah (C20) AGM, pro Stück
3	22X0003-60	Batterie 60 Ah (C20) Gel, pro Stück
3	22X0003-78	Batterie 78 Ah (C20) Gel, pro Stück
4	22X0006	Batterieband, Standard
5	22X0005	Batterie Spacer, Schaumstoff


002-01-X10

Armrests

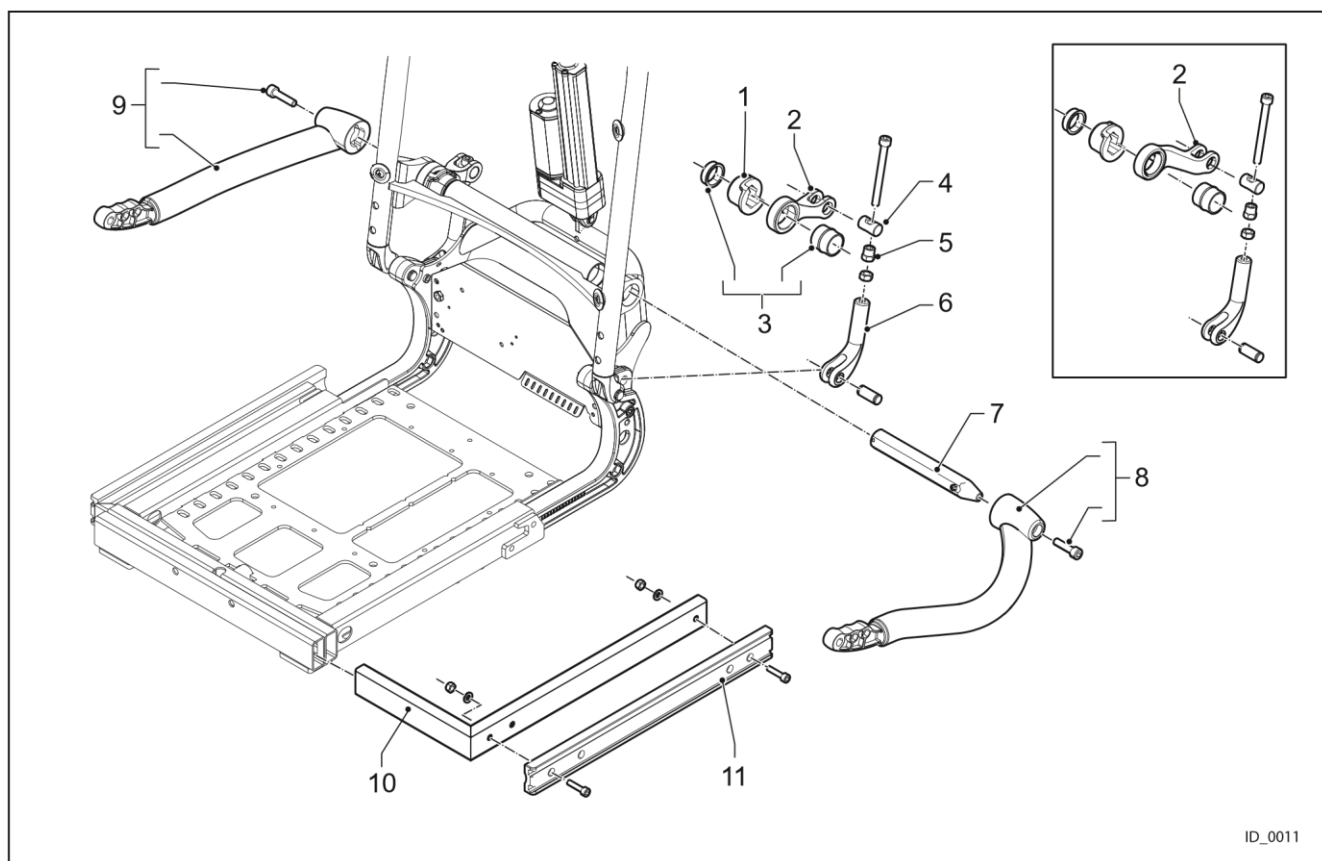


ID_0011

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0053	Armlehne Breiteneinstellung (Ring)
2	22X0056-S	Armlehnenhöhenverstellungsgabel, Standardrahmen
2	22X0056-C	Armlehnenhöhenverstellungsgabel, Compactrahmen
3	22X0054	Armlehne Lager (Messingring)
4	22X0063	Armlehnenquerstift
5	22X0065	Armlehnnensicherheitsmutter (Armlehnenhöhe)
6	22X0064	Armlehneneinstellungsgabel
7	22X0066	Armlehnenachse
8	22X0060-L	Armlehnenstange links
9	22X0060-R	Armlehnenstange rechts
10	22X0069	Sitzrahmen L-Stück (pro Stück)
11	22X0070	Sitzrahmen Multischiene (pro Stück)

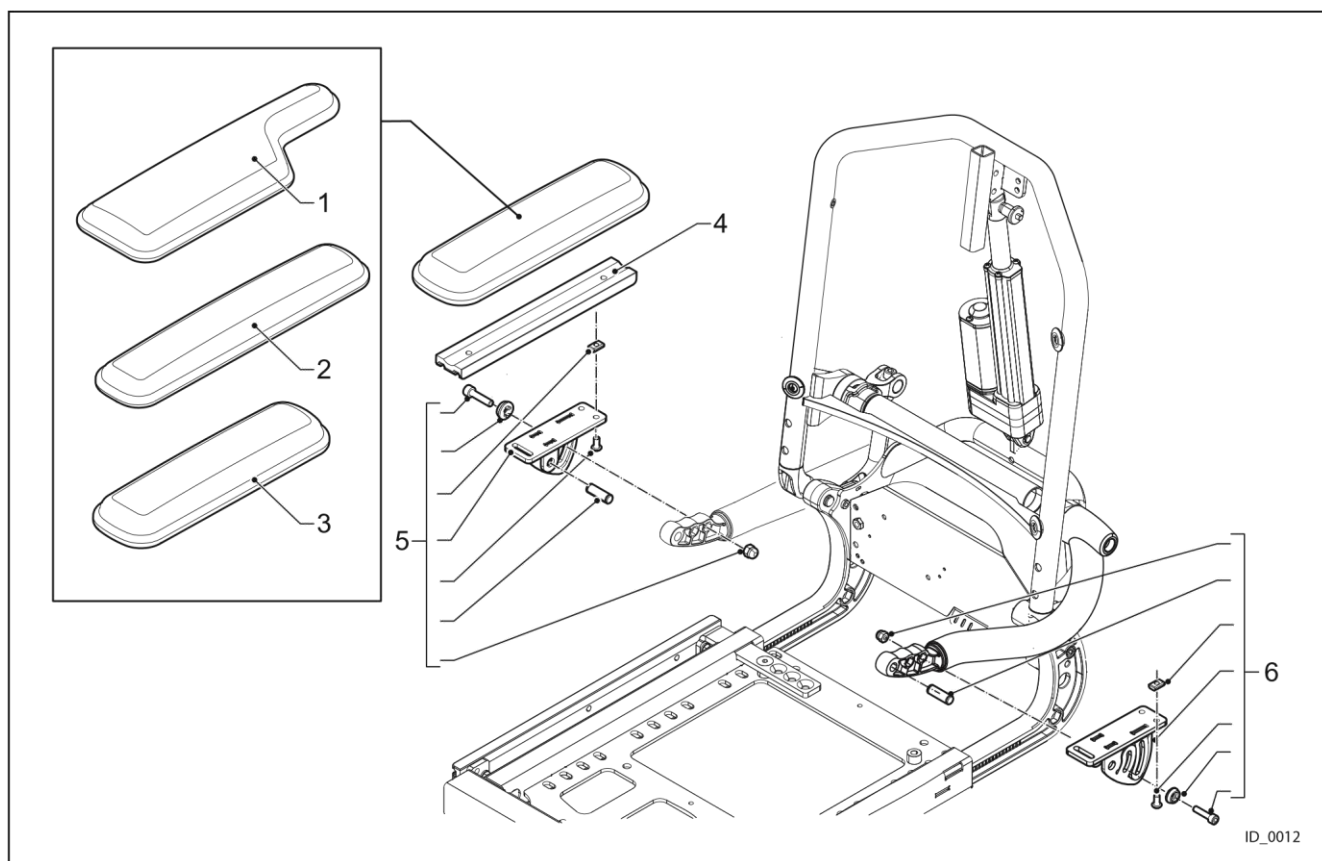
002-02-X10
Armrests


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0067-L	Armlehnenpolster P-Form, links, Kunstleder
1	22X0067-R	Armlehnenpolster P-Form, rechts, Kunstleder
2	22X0068-40	Armlehnenpolster Standard 40 cm, Kunstleder
3	22X0068-30	Armlehnenpolster Standard 30 cm, Kunstleder
4	22X0062	Armlehnenmontageschiene (pro Stück)
4	22X0070	Sitzrahmen Multischiene (pro Stück)
5	22X0055-R	Armlehnenaufnahme, rechts (Set)
6	22X0055-L	Armlehnenaufnahme, links (Set)
	24H0091-L	BB gepolsterte Armlehne links. B x L x H = 8 x 30 x 4 cm
	24H0091-R	BB gepolsterte Armlehne rechts. B x L x H = 8 x 30 x 4 cm
	24H0092-L	BB gepolsterte Armlehne links. B x L x H = 8 x 40 x 4 cm
	24H0092-R	BB gepolsterte Armlehne rechts. B x L x H = 8 x 40 x 4 cm

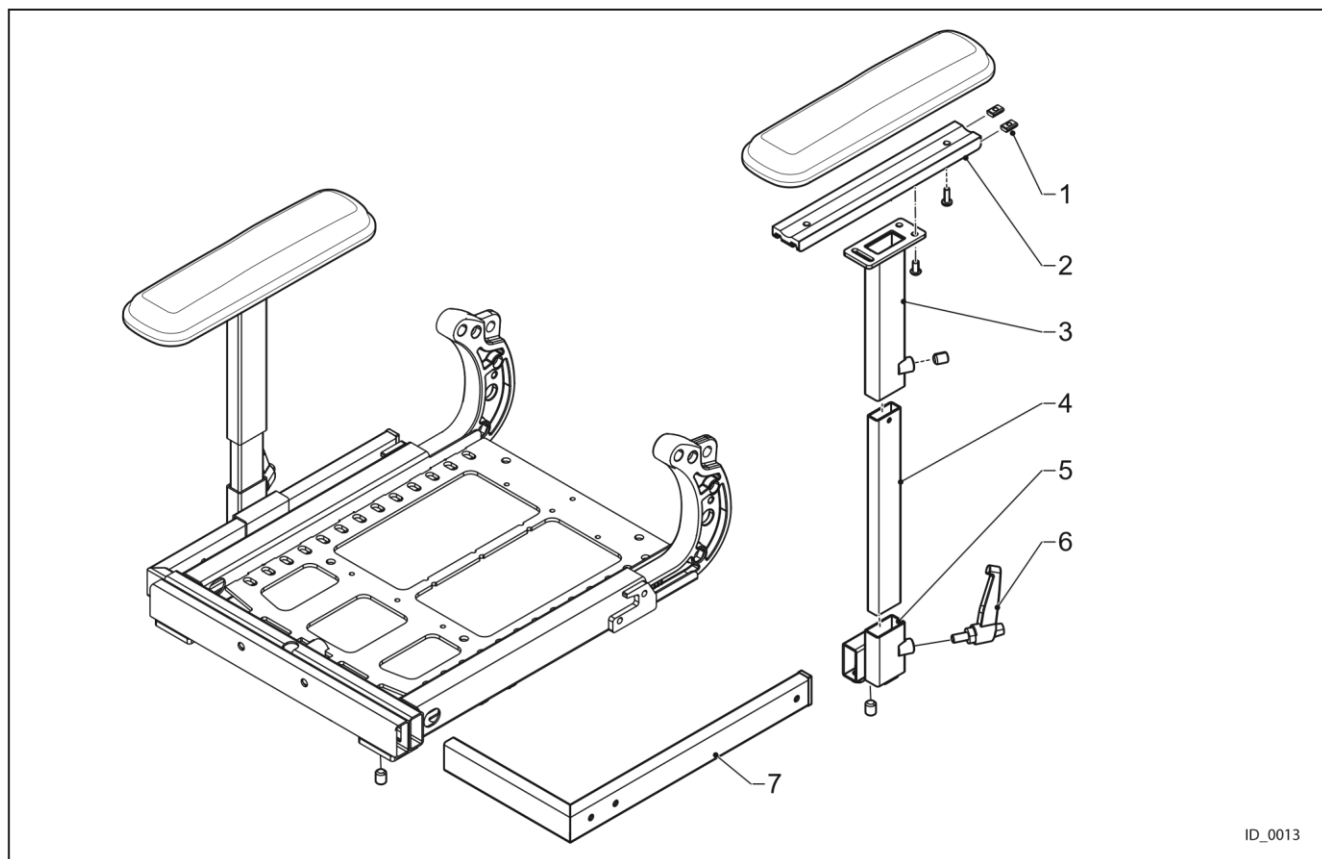

ID_0013


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0160	Nutenstein für Multischiene
2	22X0062	Armlehnenmontageschiene (27cm)(pro Stück)
2	22X0070	Sitzrahmen Multischiene/Armlehnenmontageschiene (37cm) (pro Stück)
3	22X0058-L	Armlehnenmontagebracket oberer Teil, links
3	22X0058-R	Armlehnenmontagebracket oberer Teil, rechts
4	22X0059	Armlehnenmontagebracket unterer Teil
5	22X0057-L	Armlehnenmontagebracket Sitzrahmen, links
5	22X0057-R	Armlehnenmontagebracket Sitzrahmen, rechts
6	22X0061	Kniehebelschraube M8
7	22X0069	Sitzrahmen L-Stück (pro Stück)

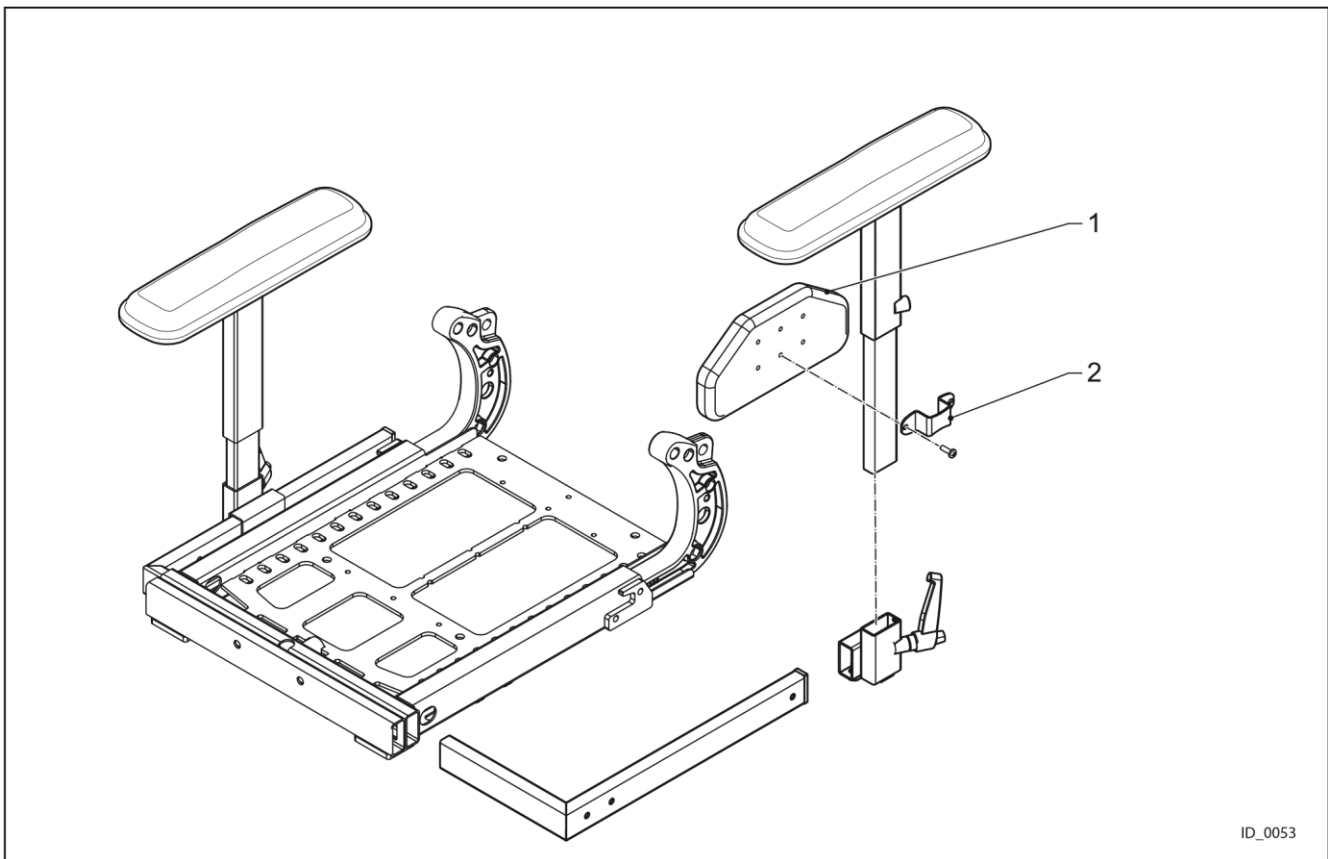

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0203	Gepolstertes Seitenteil X10-Serie (pro Stück)
2	22X0204	Montage Bracket Seitenteil X10-Serie (pro Stück)

002-05-X10


Thight Support

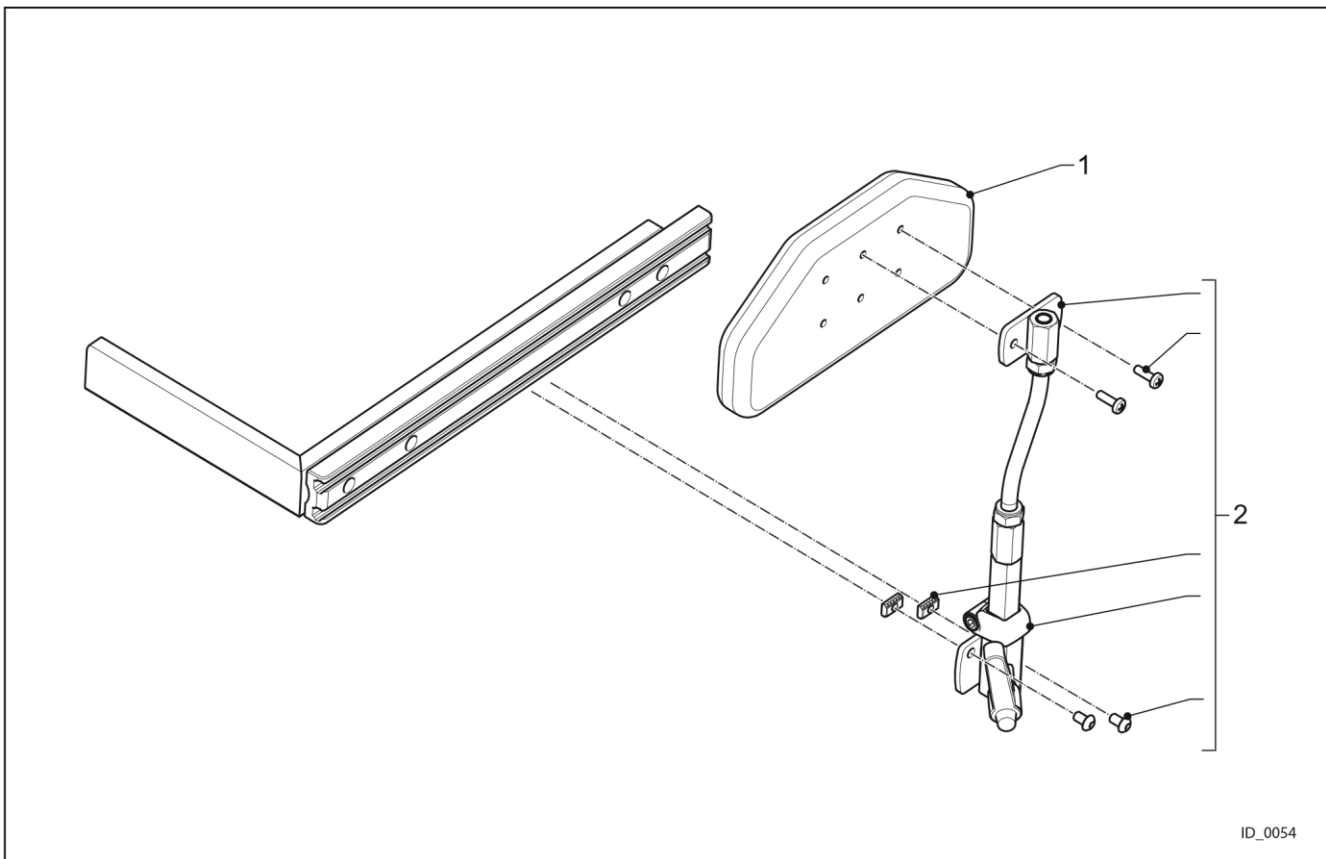

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0127	Oberschenkelpolster (pro Stück)
2	22X0128	Oberschenkelstützenhalter
1+2	22X0129-L	Oberschenkelstütze multifunktionell einstellbar, komplett, links
1+2	22X0129-R	Oberschenkelstütze multifunktionell einstellbar, komplett, rechts

002-06-X10


Standard Legrest

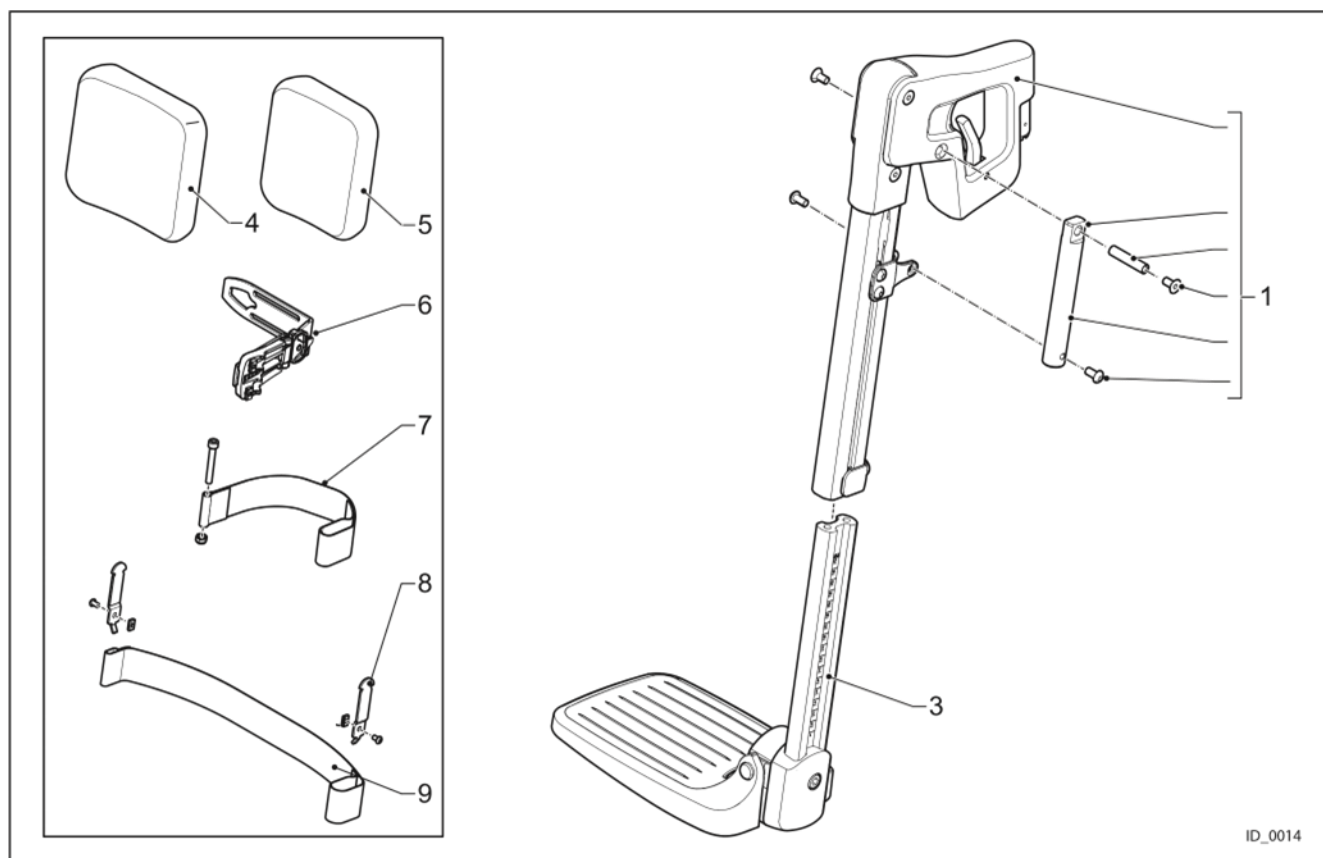


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0084-L	Beinstütze oberer Teil links
1	22X0084-R	Beinstütze oberer Teil rechts
3	22X0085	Fußplatte inkl. Einsteckrohr
4	22X0086-19	Wadenplattenpolster, getrennte Beinstütze, 19 cm (Set)
5	22X0086-16	Wadenplattenpolster, getrennte Beinstütze, 16 cm (Set)
6	22X0087	Wadenplattenhalter, getrennte Beinstütze
7	22X0088-R	Fersenband, getrennte Beinstütze, rechts
7	22X0088-L	Fersenband, getrennte Beinstütze, links
8	22X0089	Wadenband Clip
9	22X0090	Wadenband getrennte Beinstützen

002-06-X10


Comfort Legrest

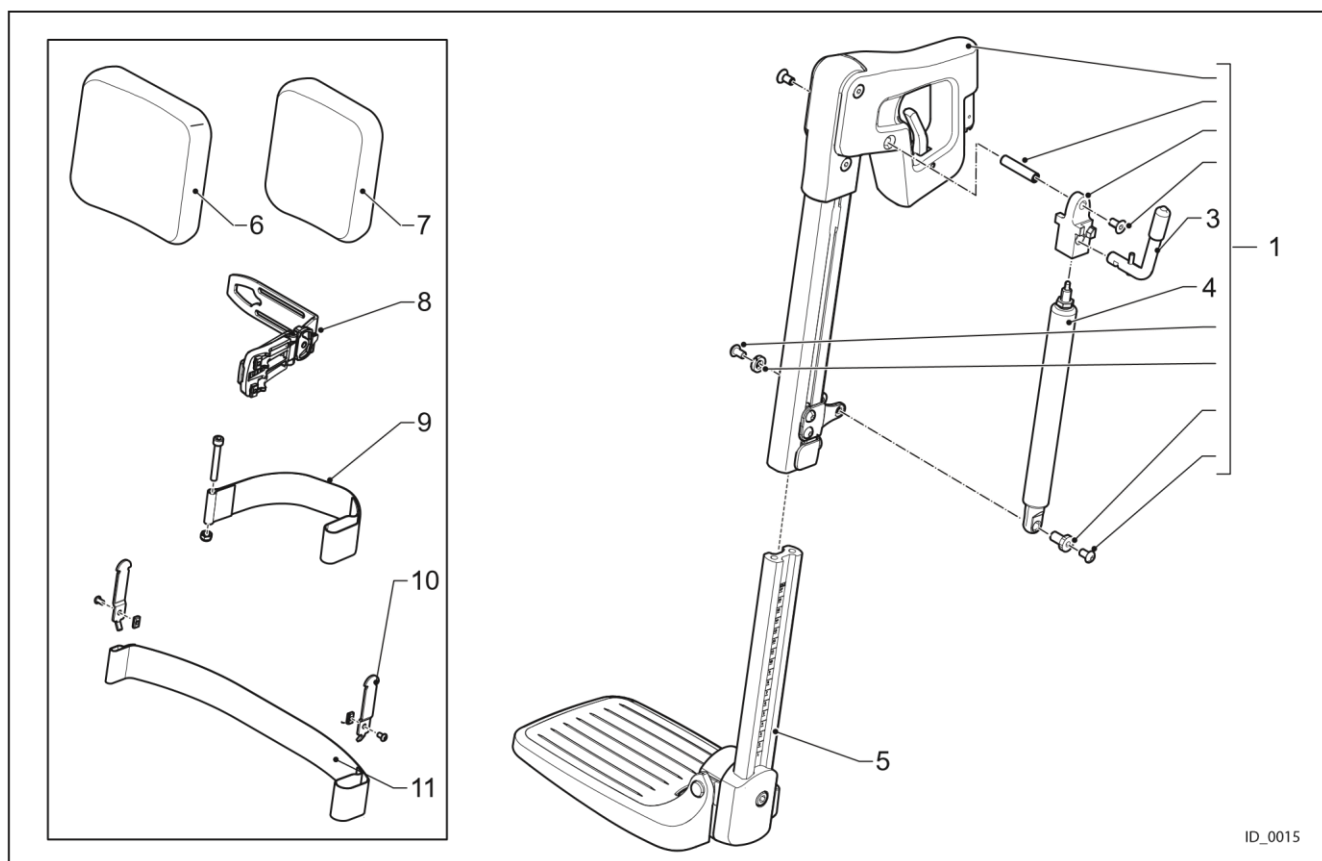

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0091-L	Beinstütze oberer Teil, inkl. Gasdruckfeder, links
1	22X0091-R	Beinstütze oberer Teil, inkl. Gasdruckfeder, rechts
2	22X0092	Gasdruckfeder 200N für getrennte Beinstütze, komplett
3	22X0093	Gasdruckfederhebel, getrennte Beinstütze
4	22X0094	Gasdruckfeder 200N für getrennte Beinstütze
5	22X0085	Fußplatte inkl. Einsteckrohr
6	22X0086-19	Wadenplattenpolster, getrennte Beinstütze, 19 cm (Set)
7	22X0086-16	Wadenplattenpolster, getrennte Beinstütze, 16 cm (Set)
8	22X0087	Wadenplattenhalter, getrennte Beinstütze
9	22X0088-R	Fersenband, getrennte Beinstütze, rechts
9	22X0088-L	Fersenband, getrennte Beinstütze, links
10	22X0089	Wadenband Clip
11	22X0090	Wadenband getrennte Beinstützen

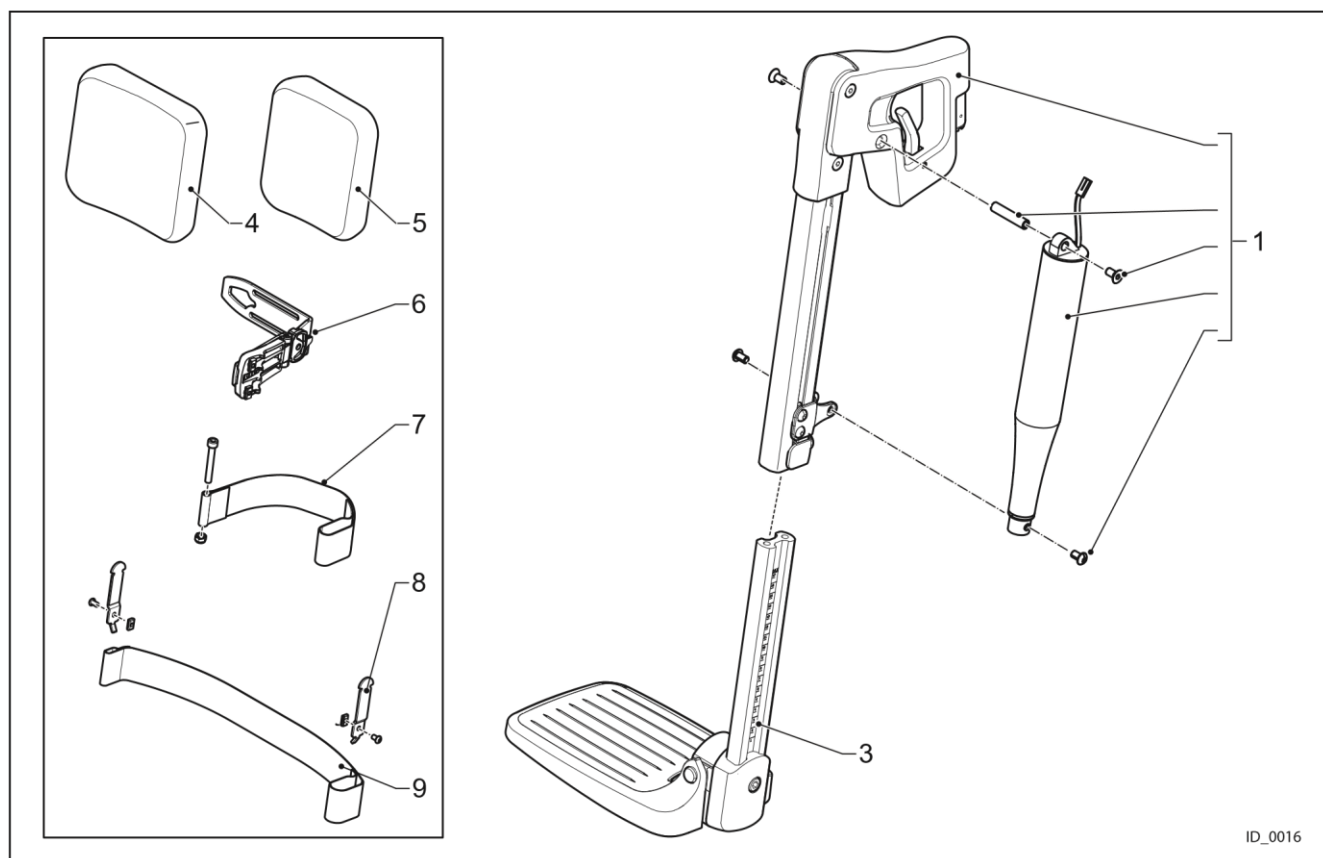002-08-X10
Powered Legrest


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0095-L	Beinstütze elektrisch oberer Teil, links
1	22X0095-R	Beinstütze elektrisch oberer Teil, rechts
2	22X0045	Actuator getrennte Beinstütze
3	22X0085	Fußplatte inkl. Einsteckrohr
4	22X0086-19	Wadenplattenpolster, getrennte Beinstütze, 19 cm (Set)
5	22X0086-16	Wadenplattenpolster, getrennte Beinstütze, 16 cm (Set)
6	22X0087	Wadenplattenhalter, getrennte Beinstütze
7	22X0088-R	Fersenband, getrennte Beinstütze, rechts
7	22X0088-L	Fersenband, getrennte Beinstütze, links
8	22X0089	Wadenband Clip
9	22X0090	Wadenband getrennte Beinstützen

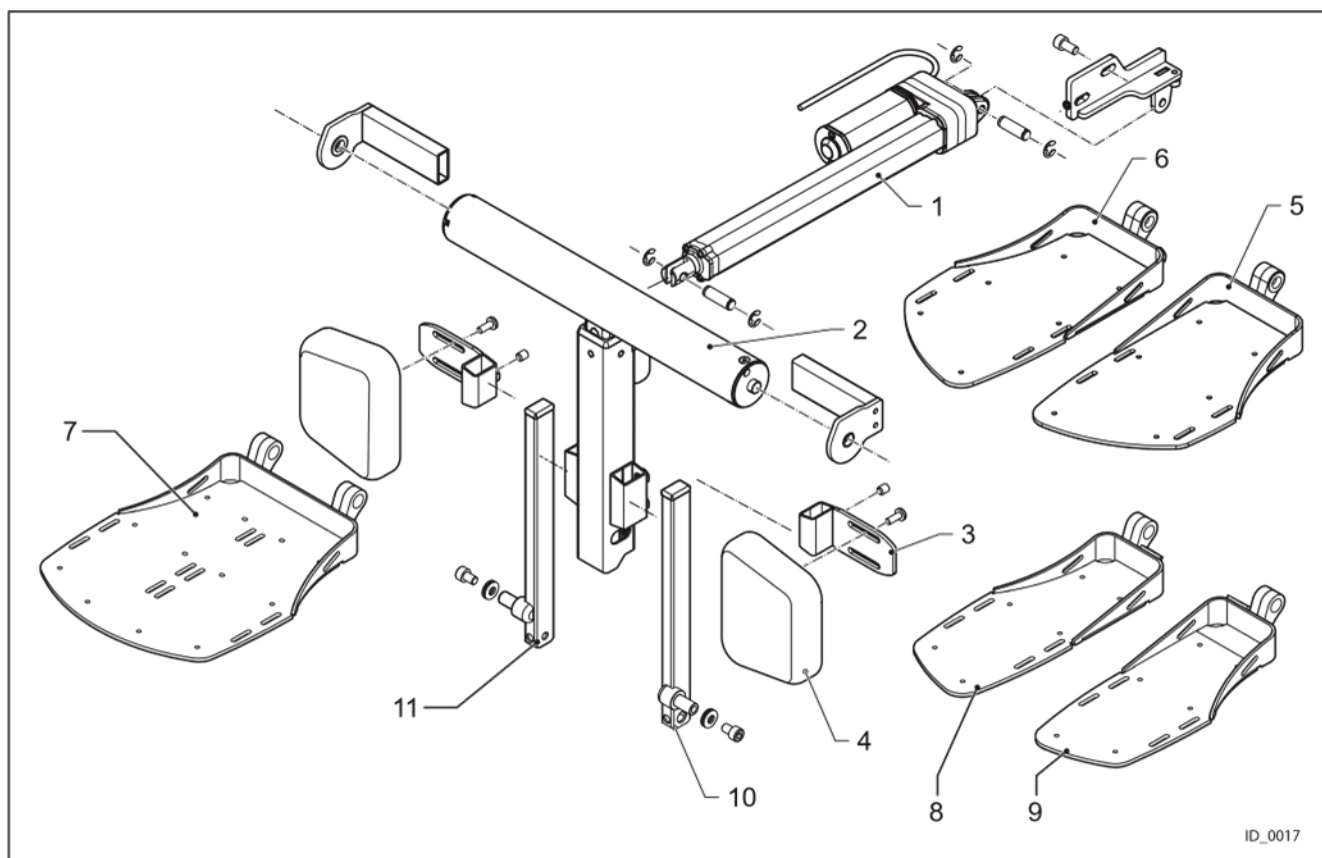
002-09-X10 Powered Central Legrest


ID_0017


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0043	Actuator Beinwinkelverstellung (2500N, 60mm)
1	22X0044	Actuator Beinwinkelverstellung (2500N, 90mm) (175 Grad)
2	22X0098	T-Stück zentrale multifunktionale Beinstütze
2	22X0099	T-Stück zentrale multifunktionale Beinstütze, 90° - 175°
3	22X0100	Wadenplattenhalter, zentrale Beinstütze (pro Stück)
4	22X0101	Wadenplatten zentrale Beinstütze (Set)
5	22X0102-L	Fußplatte breit, links (zentrale Beinstütze)
6	22X0102-R	Fußplatte breit, rechts (zentrale Beinstütze)
7	22X0105	durchgehende Fußplatte, schmal
7	22X0104	durchgehende Fußplatte, breit
8	22X0103-R	Fußplatte schmal, rechts (zentrale Beinstütze)
9	22X0103-L	Fußplatte schmal, links (zentrale Beinstütze)
10	22X0106-L	Einsteckrohr zentrale Beinstütze, links
11	22X0106-R	Einsteckrohr zentrale Beinstütze, rechts

002-10-X10

Fixed Central Legrest

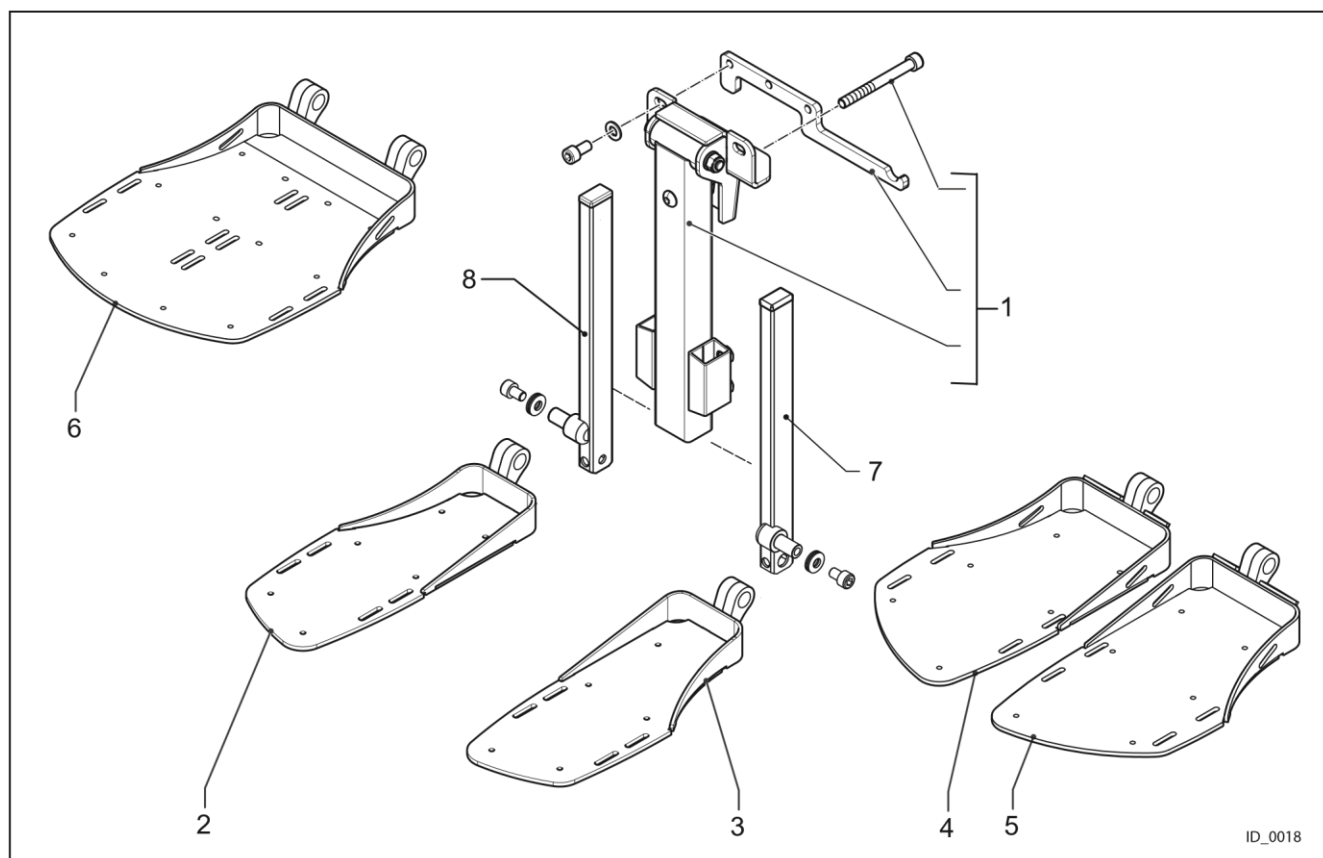


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0109	zentrale Beinstütze, fester Winkel
2	22X0103-R	Fußplatte schmal, rechts (zentrale Beinstütze)
3	22X0103-L	Fußplatte schmal, links (zentrale Beinstütze)
4	22X0102-R	Fußplatte breit, rechts (zentrale Beinstütze)
5	22X0102-L	Fußplatte breit, links (zentrale Beinstütze)
6	22X0105	durchgehende Fußplatte, schmal
6	22X0104	durchgehende Fußplatte, breit
7	22X0106-L	Einsteckrohr zentrale Beinstütze, links
8	22X0106-R	Einsteckrohr zentrale Beinstütze, rechts

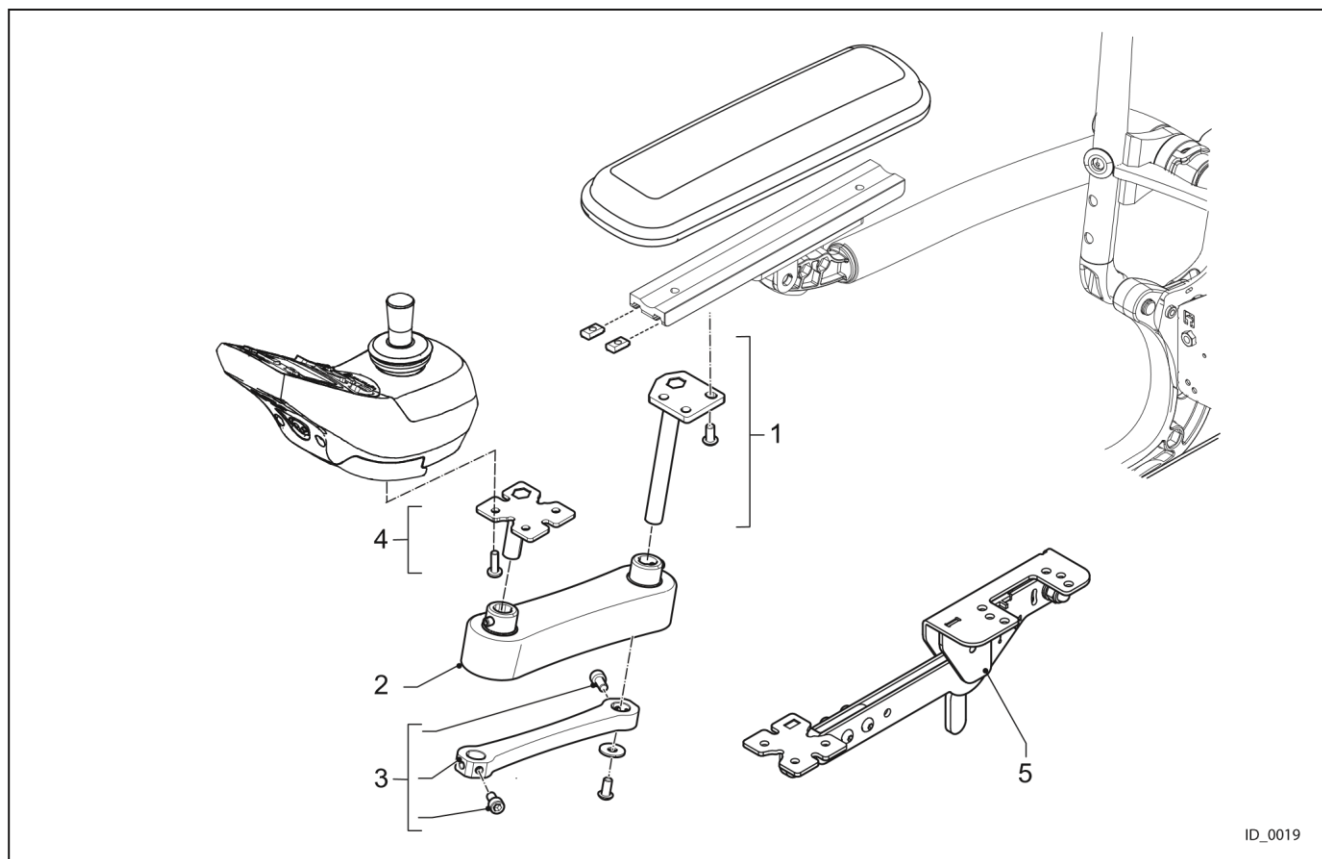


ID_0019

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0110-R	Parallelogrammhalter, rechts
1	22X0110-L	Parallelogrammhalter, links
2	22X0111	Parallelogramm
3	22X0115	Joystickhalter fest
4	22X0112-R	Joystickaufnahme, rechts
4	22X0112-L	Joystickaufnahme, links
5	22X0114-R	Joystickaufnahme nach unten wegklappbar, rechts
5	22X0114-L	Joystickaufnahme nach unten wegklappbar, links

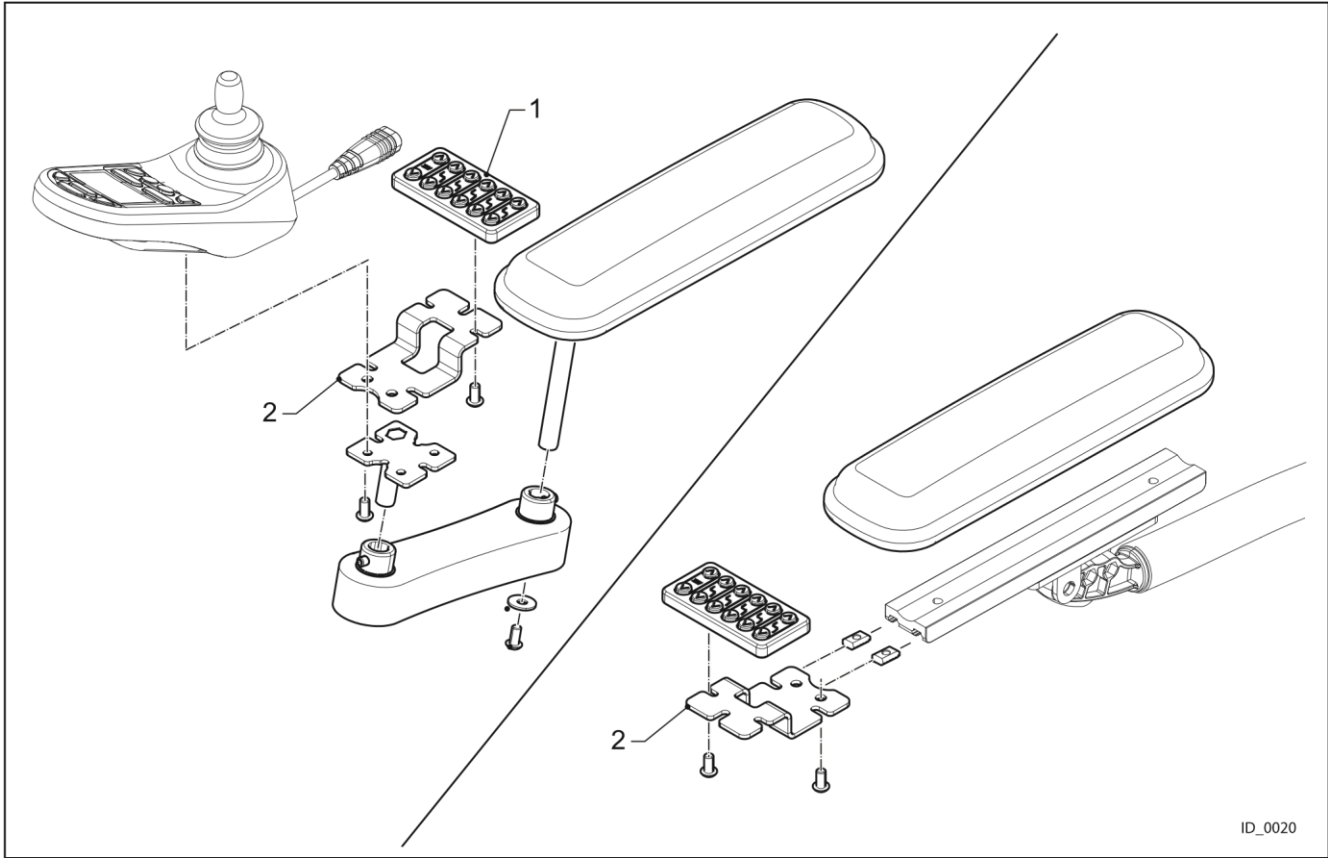

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0117	Multischalterbox (CJSM)
1	22X0118	Multischalterbox (CJSM2)
2	22X0119	Multischalterbox Montage Bracket

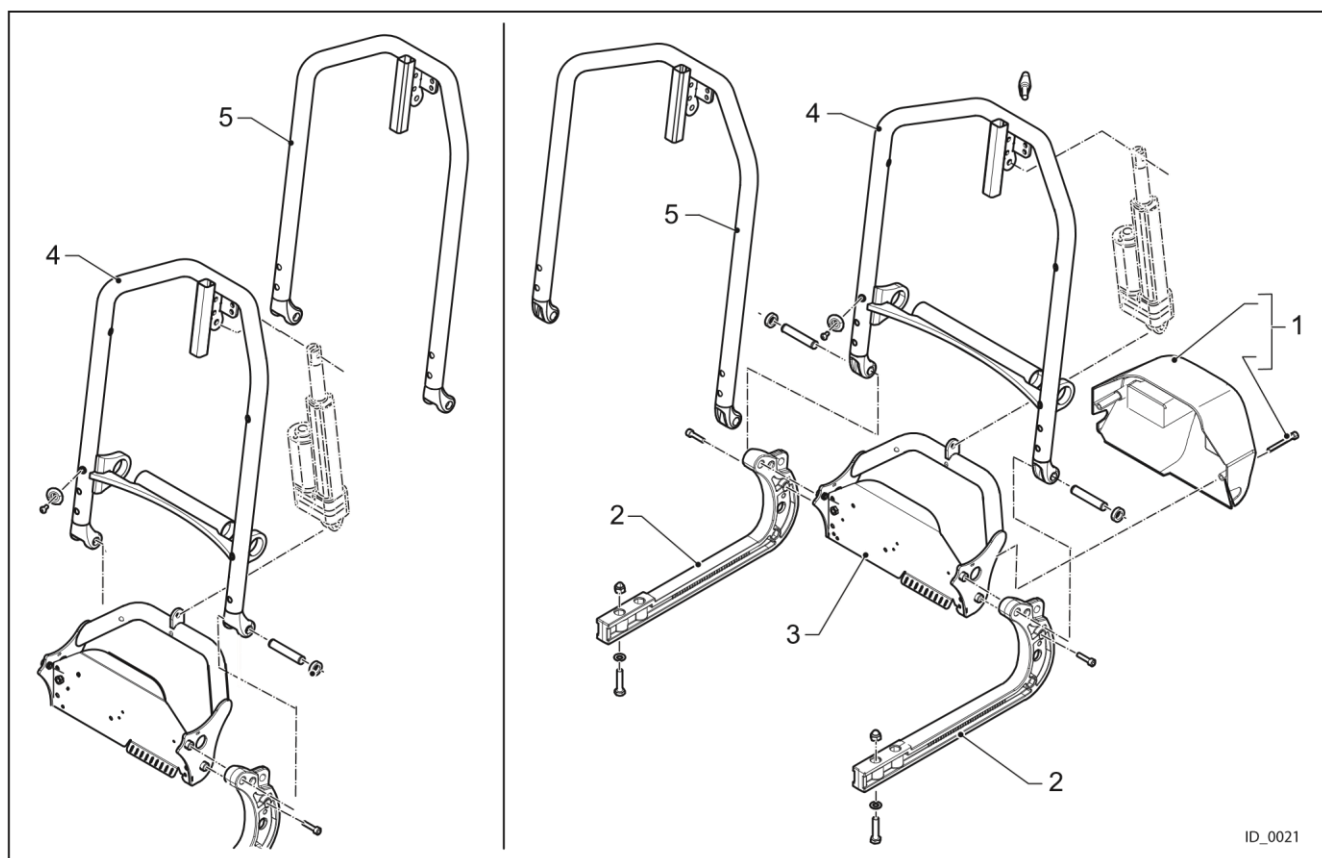
002-13-X10
Backrest Frame


ID_0021

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0071	ISM Bekappung
2	22X0072	Rückenrahmenaufnahme - Sitztiefeinstellung
3	22X0073	Rückenrahmenaufnahme
4	22X0074-S	Rückenrahmen (hochklappbare Armlehnen) komplett, Standard Chassis
4	22X0074-C	Rückenrahmen (hochklappbare Armlehnen) komplett, Compact Chassis
5	22X0075-S	Rückenrahmen (St. Armlehnenmontage) komplett, Standard Chassis
5	22X0075-C	Rückenrahmen (St. Armlehnenmontage) komplett, Compact Chassis

002-14-X10


Recline exploded

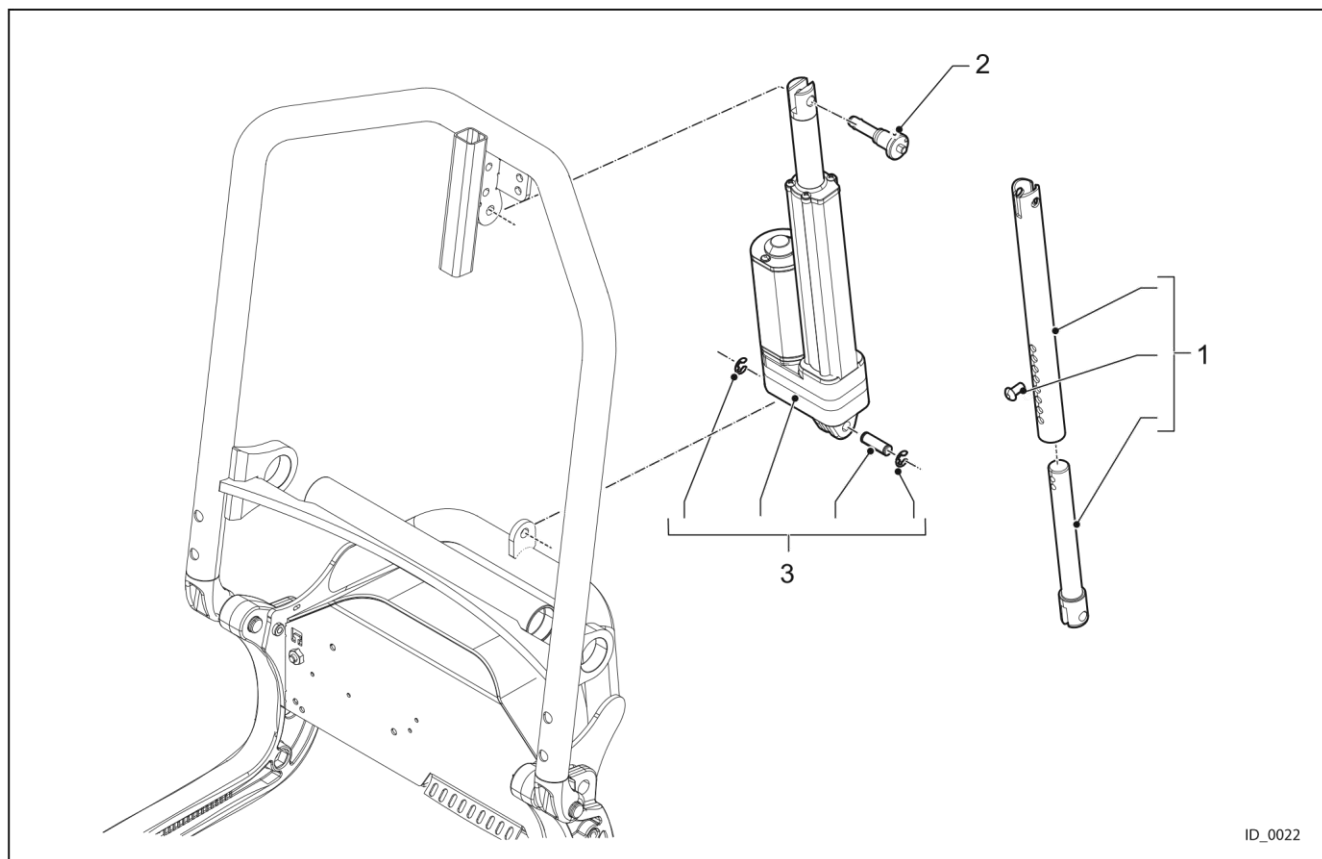

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0077	Rückenwinkel manuell einstellbar
2	22X0078	Quick Release Pin Rückenactuator
3	22X0050	Actuator Rückenwinkelverstellung (bis Serien-Nr. 21000191)
3	22X0049	Actuator Rückenwinkelverstellung (ab Serien-Nr. 21000192)

002-15-X10


Backrest mounting

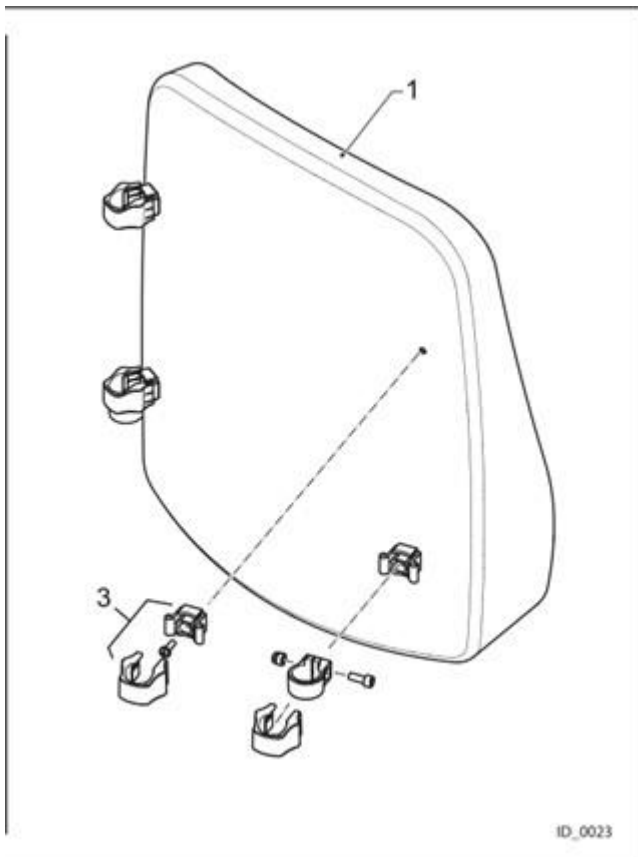

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
3	22X0121	Rückenlehnenmontage-Set (4 Stück)


002-17-X10

Legrest mounting

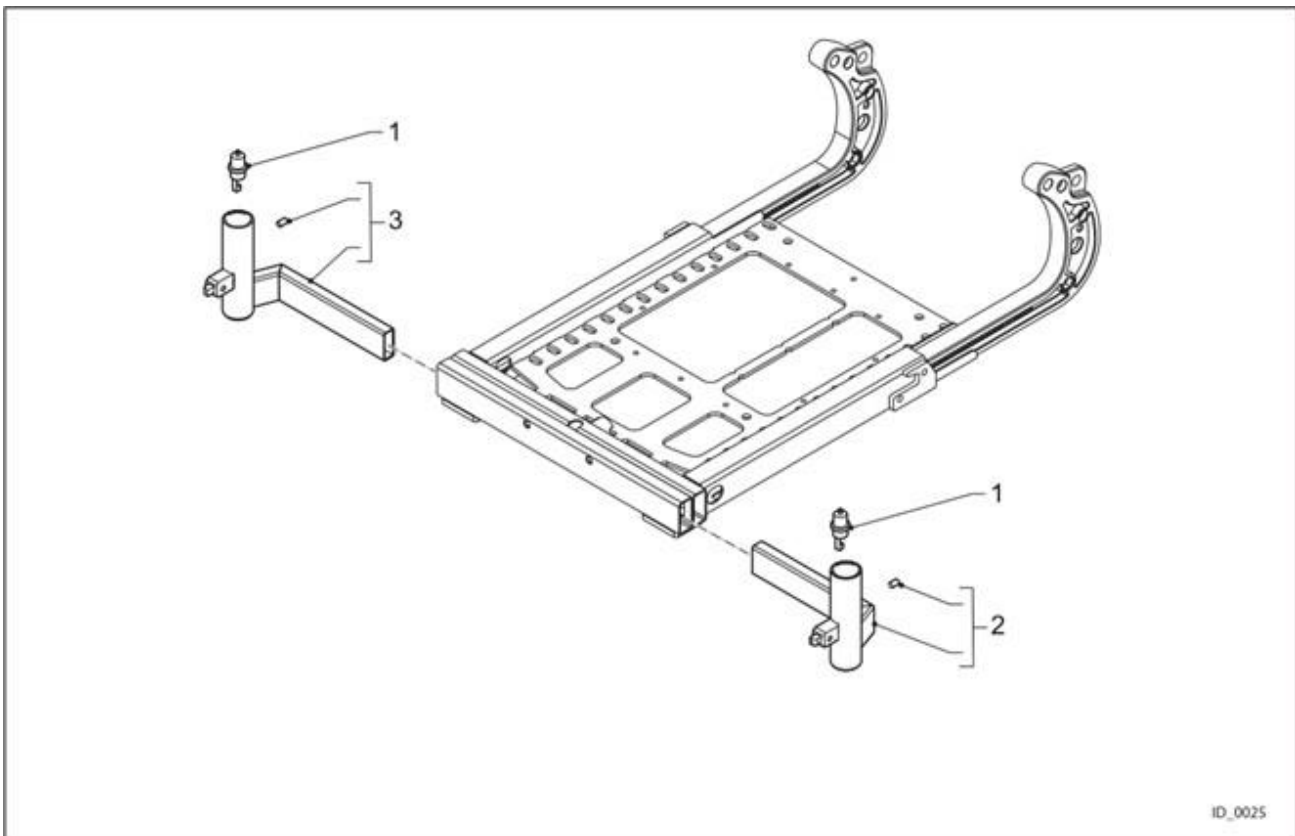

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0096	Elektroanschluß für getrennte elektrische Beinstütze (pro Stück)
2	22X0097-L	Aufnahme getrennte Beinstütze, links
3	22X0097-R	Aufnahme getrennte Beinstütze, rechts


002-18-X10 Seat cushion mounting

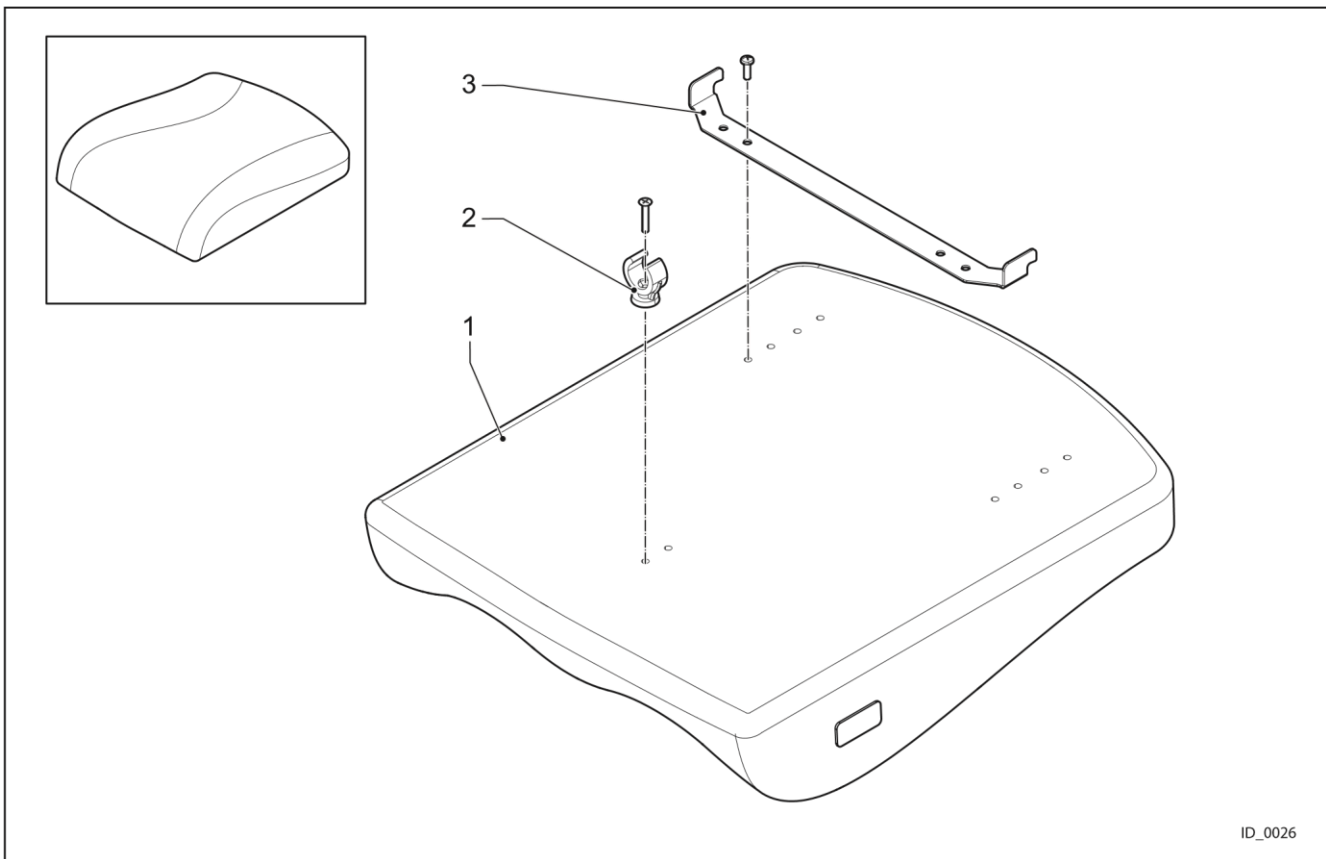


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
2	22X0123	Befestigungsklemme für Sitzplatte/Sitzkissen
3	22X0124	hinteres Bracket Sitzkissen

002-20-X10


Seat plates

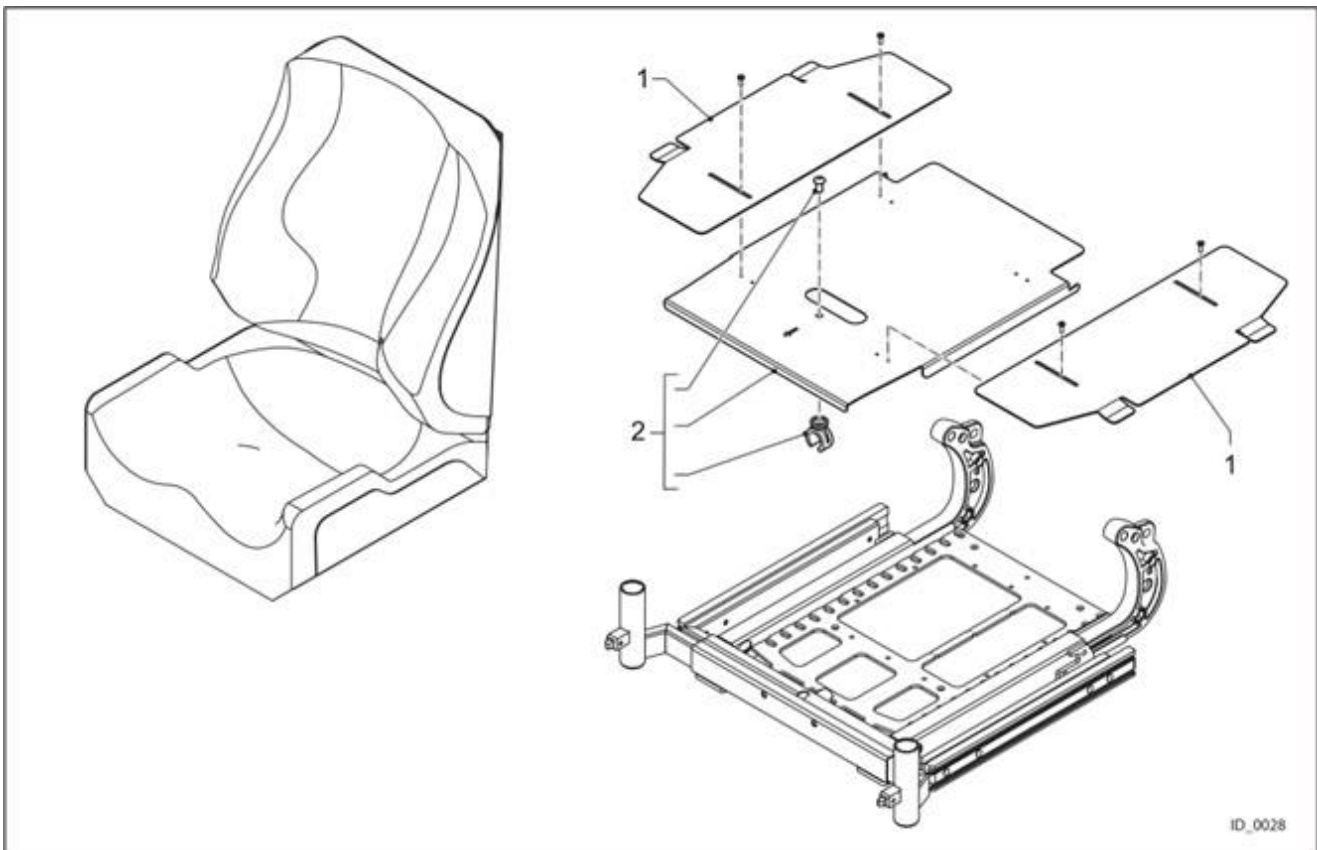

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0126	Sitzverbreiterungsplatte (pro Stück)
2	22X0125	Sitzplatte

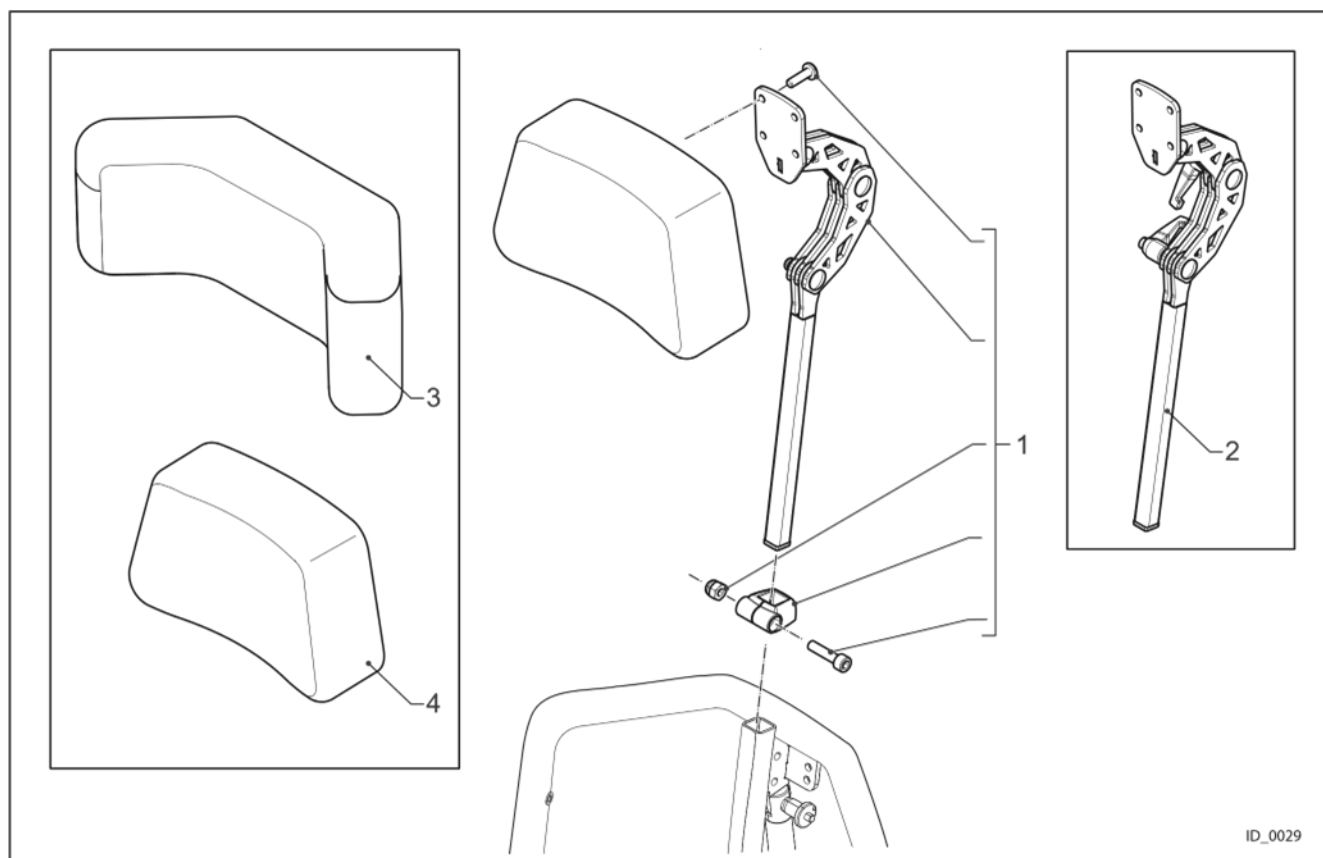
002-21-X10
Head Rests


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0079	Kopfstützenhalter X10, einstellbar
2	22X0080	Kopfstützenhalter X10, einstellbar über Hebelschrauben
3	22X0083	Kopfstützenpolster, anpassbare Kopfstütze
4	22X0082	Kopfstützenpolster, gepolsterte Kopfstütze

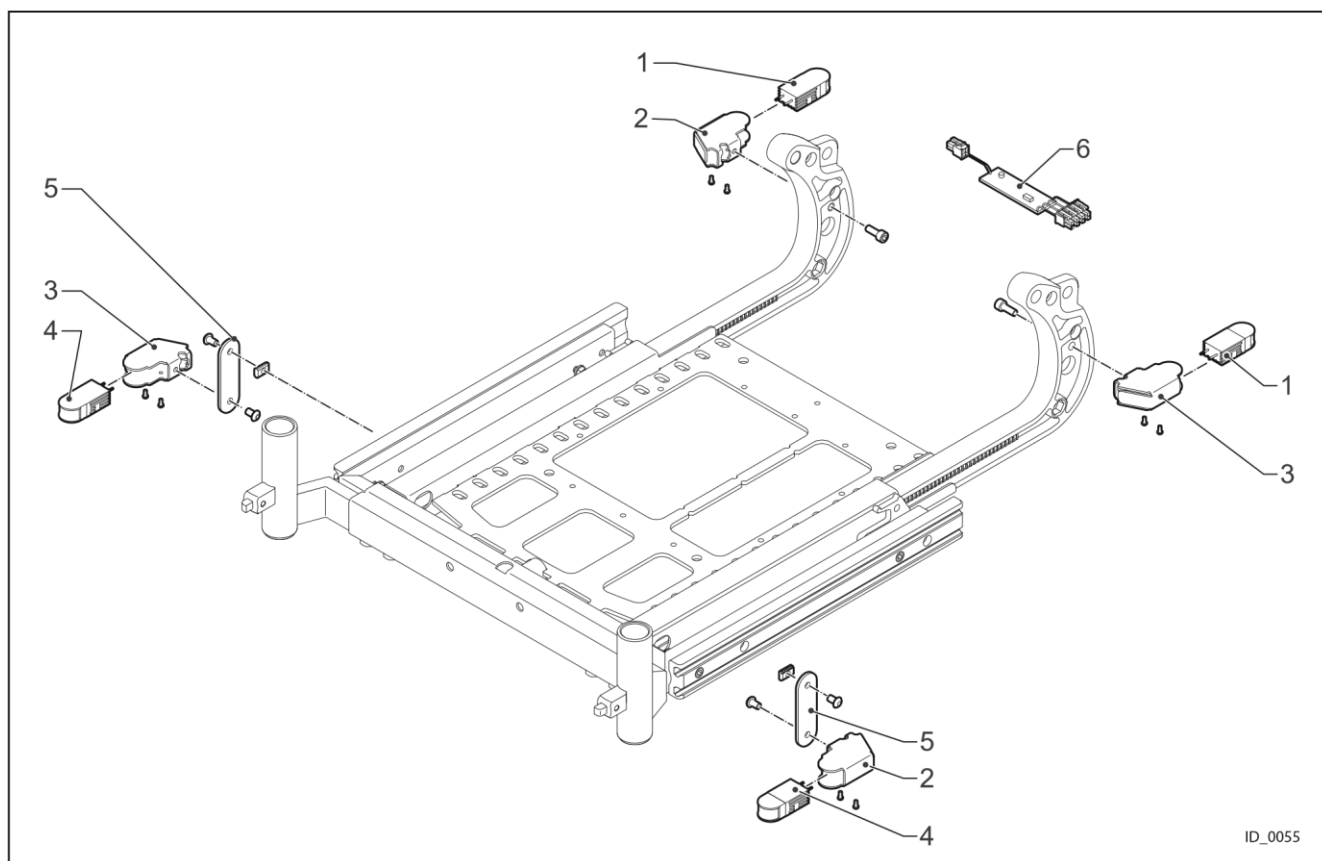


ID_0055

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0134	Scheinwerfer hinten, 2. Generation (pro Stück)
2	22X0136	Scheinwerfer Gehäuse, 2. Generation Beleuchtung, Model A (pro Stück)
3	22X0137	Scheinwerfer Gehäuse, 2. Generation Beleuchtung, Model B (pro Stück)
4	22X0135	Scheinwerfer vorne, 2. Generation (pro Stück)
5	22X0139	Montageplatte Scheinwerfer vorne
6	22X0140	Beleuchtungsplatine

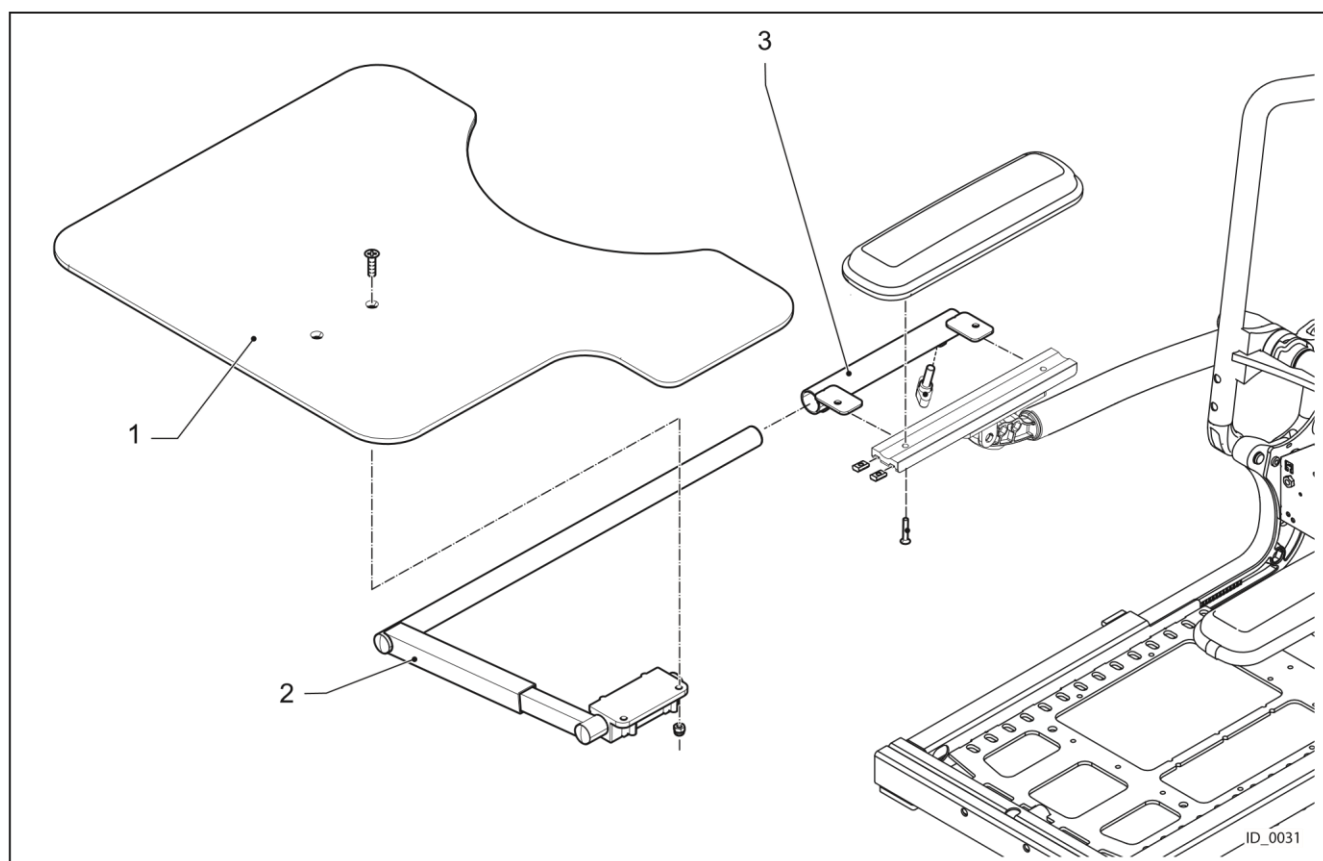
002-23-X10 Work Tray


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
2	22X0205	Tischhalterung Universal
3	22X0158	Halter für Tischhalterung (Armlehnenmontage)
1+2+3	29X0008-55	Therapietisch abschwenkbar inkl. Halterung, Breite x Tiefe = 55 x 50 cm
1+2+3	29X0008-60	Therapietisch abschwenkbar inkl. Halterung, Breite x Tiefe = 60 x 50 cm
1+2+3	29X0008-65	Therapietisch abschwenkbar inkl. Halterung, Breite x Tiefe = 65 x 50 cm

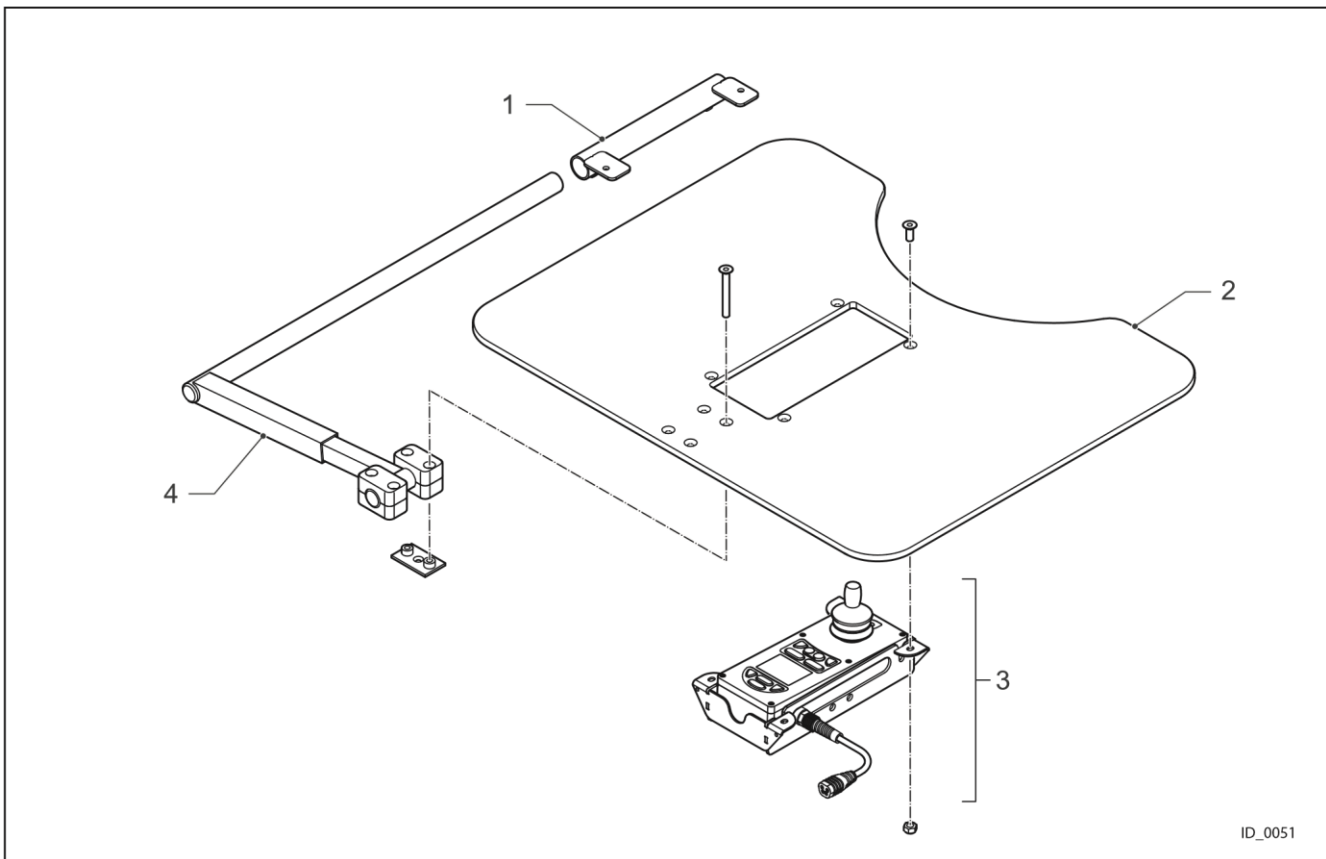

ID_0051


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0158	Halter für Tischhalterung (Armlehnenmontage)
2	22X0170	Tischplatte für Tischmittelsteuerung R-Net CJSJ umkehrbar
3	22X0169	Tischmittelsteuerung R-Net CJSJ umkehrbar
4	22X0168	Tischhalterung für Tischmittelsteuerung

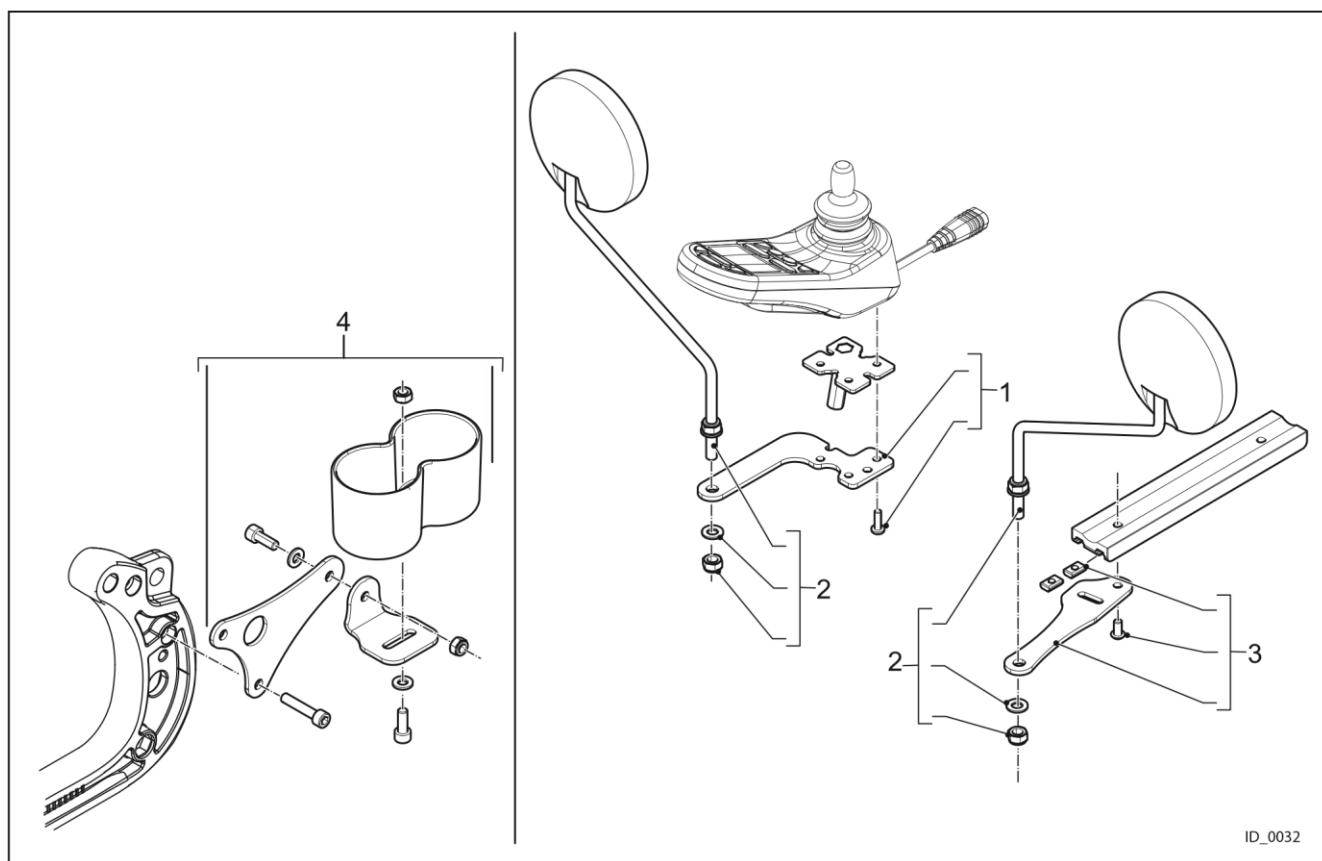

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0165	Spiegelhalter, Joystickmontage
2	22X0163	Spiegel
3	22X0164	Spiegelhalter, Armlehnenmontage
4	22X0166	Stockhalter

002-24-X10


Options

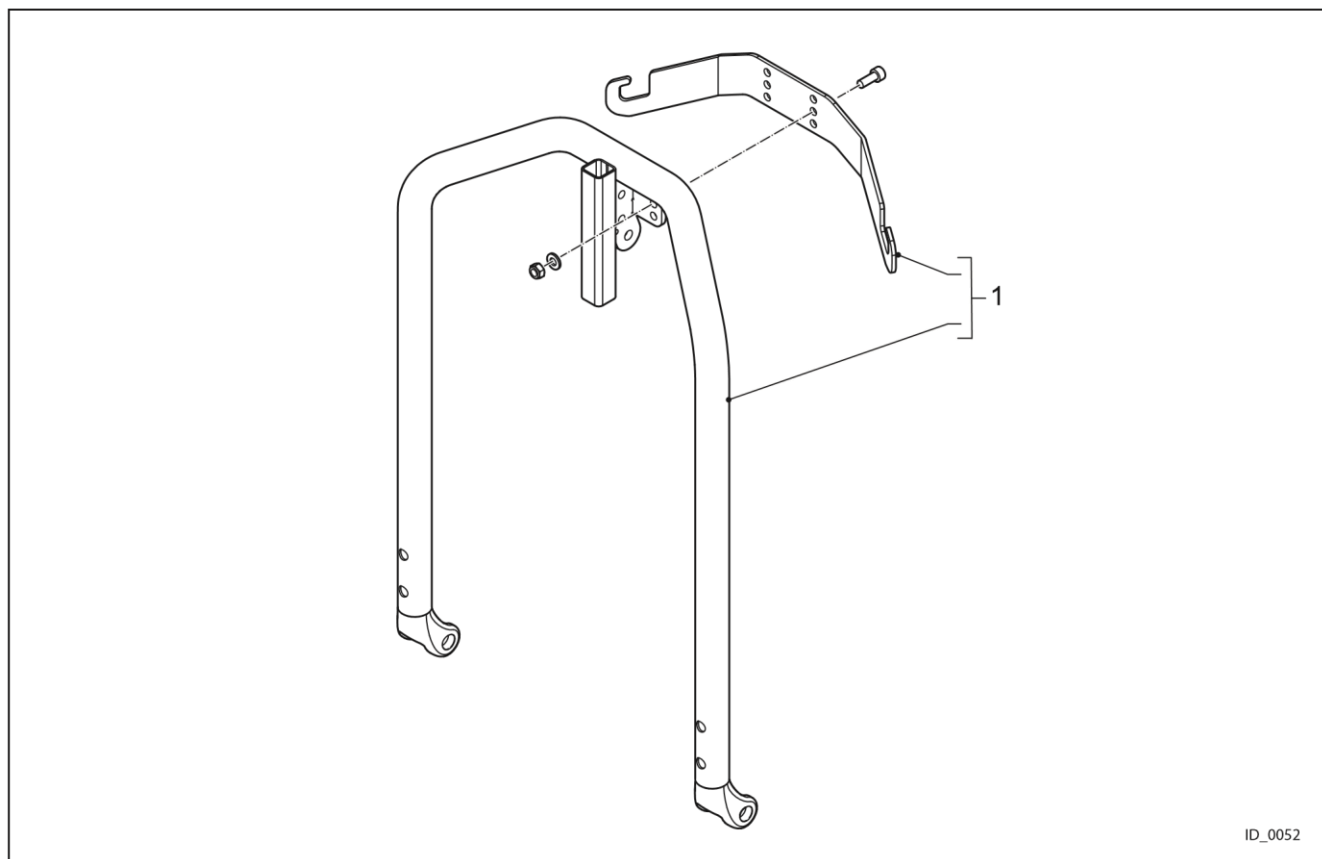

ID_0052

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0076	Rückenrahmen Stabilitätsbügel


002-25-X10 Attendant Control Brackets

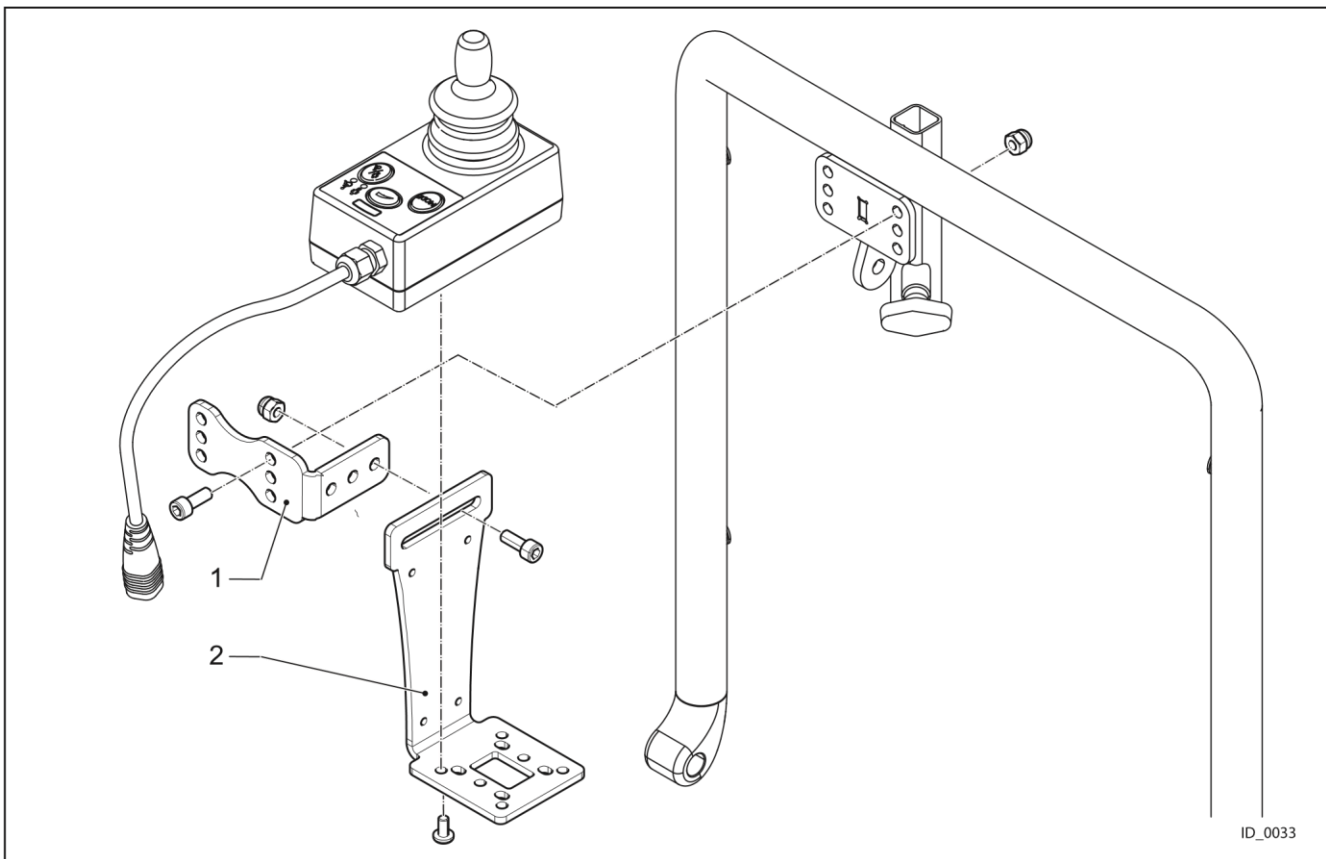

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1+2	22X0159	Halterung Begleitersteuerung

002-27-X10


Lap Belts

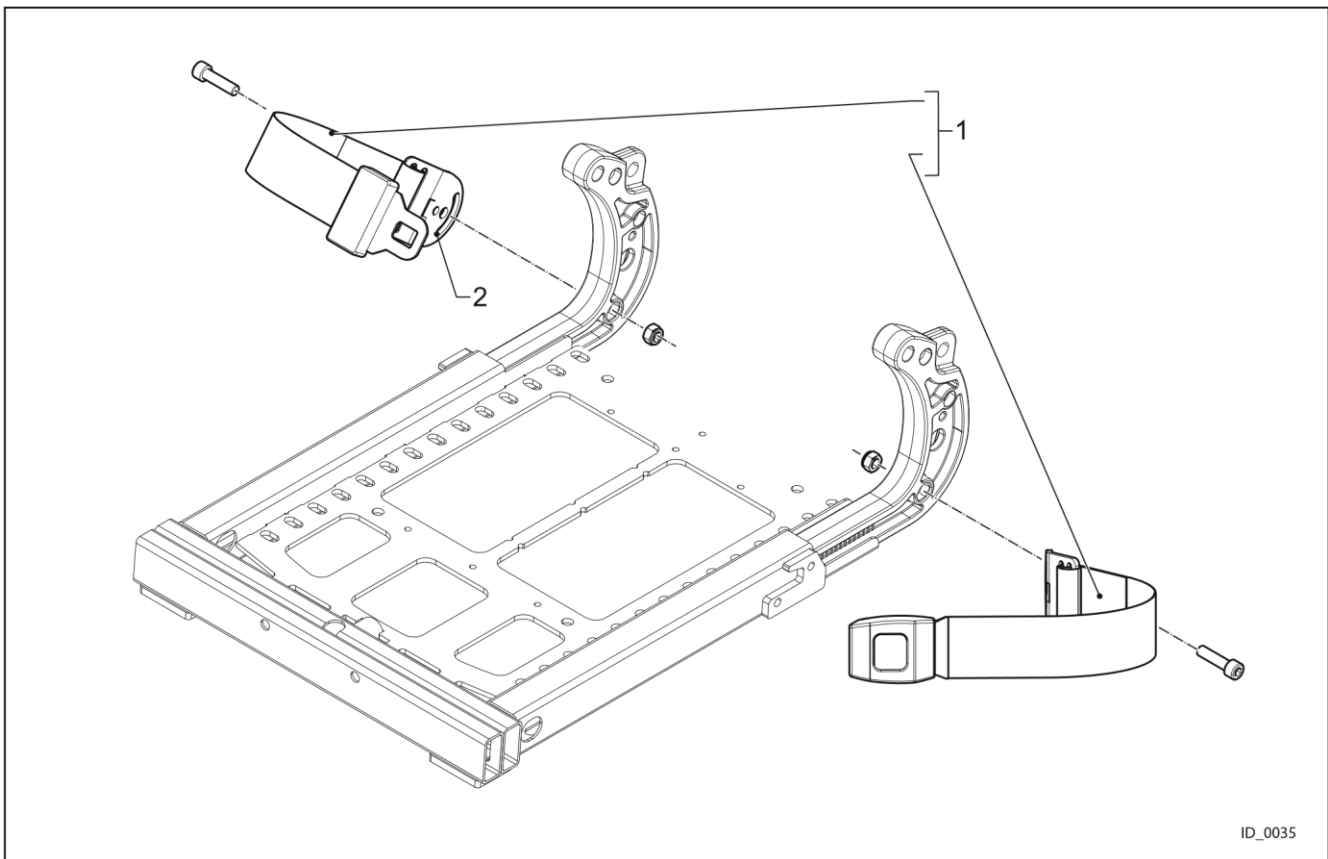

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0511	Beckengurt 1,90 m
2	29X0005	Gurt mit Rollautomat


003-01-X10

Lift-Tilt-Module

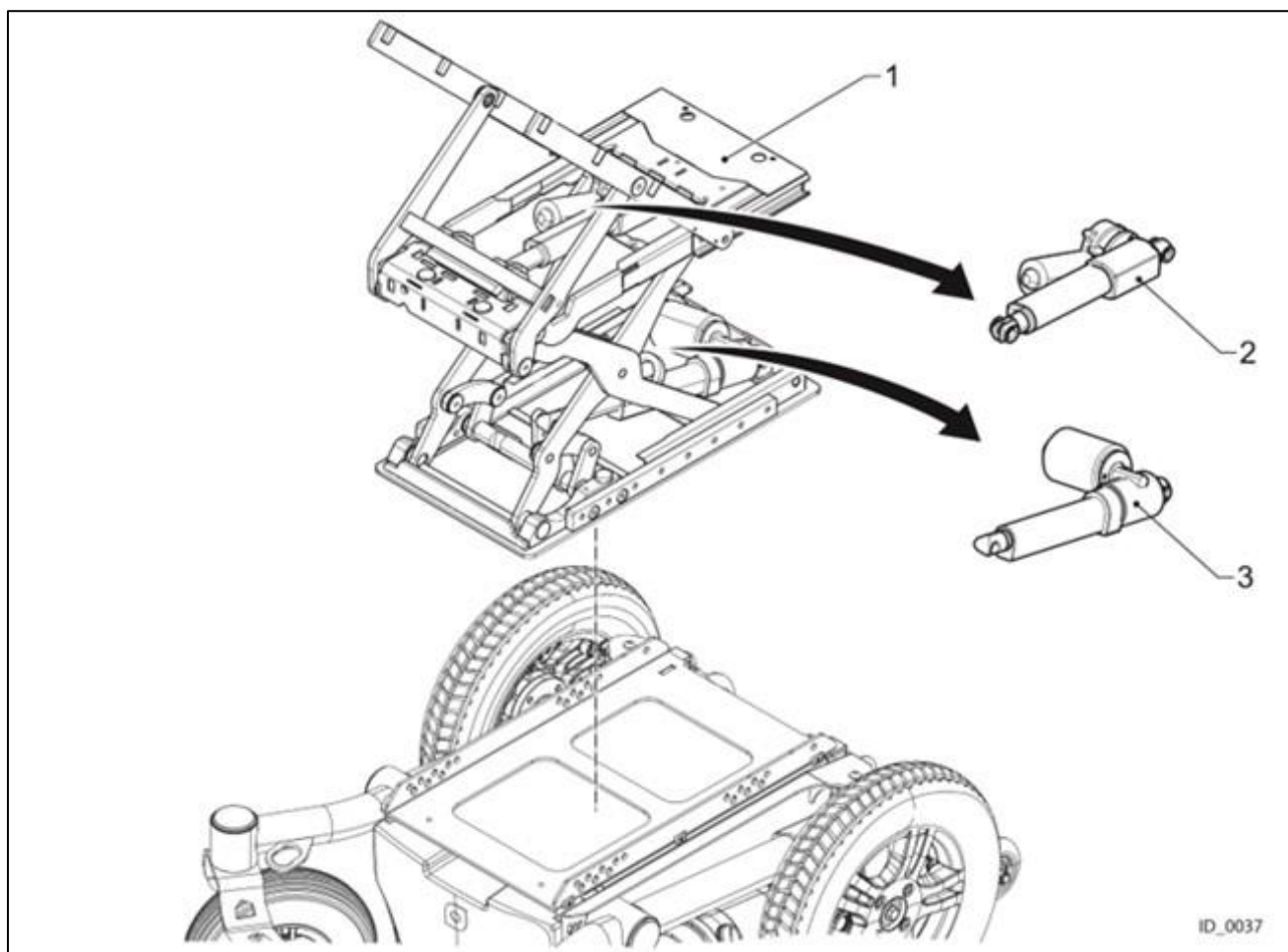


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0149	REAC Sitzlift / Sitzwinkerverstellungs Modul
2	22X0052	Actuator Sitzwinkerverstellung
3	22X0051	Actuator Sitzlift

003-02-X10 Catapult Seat

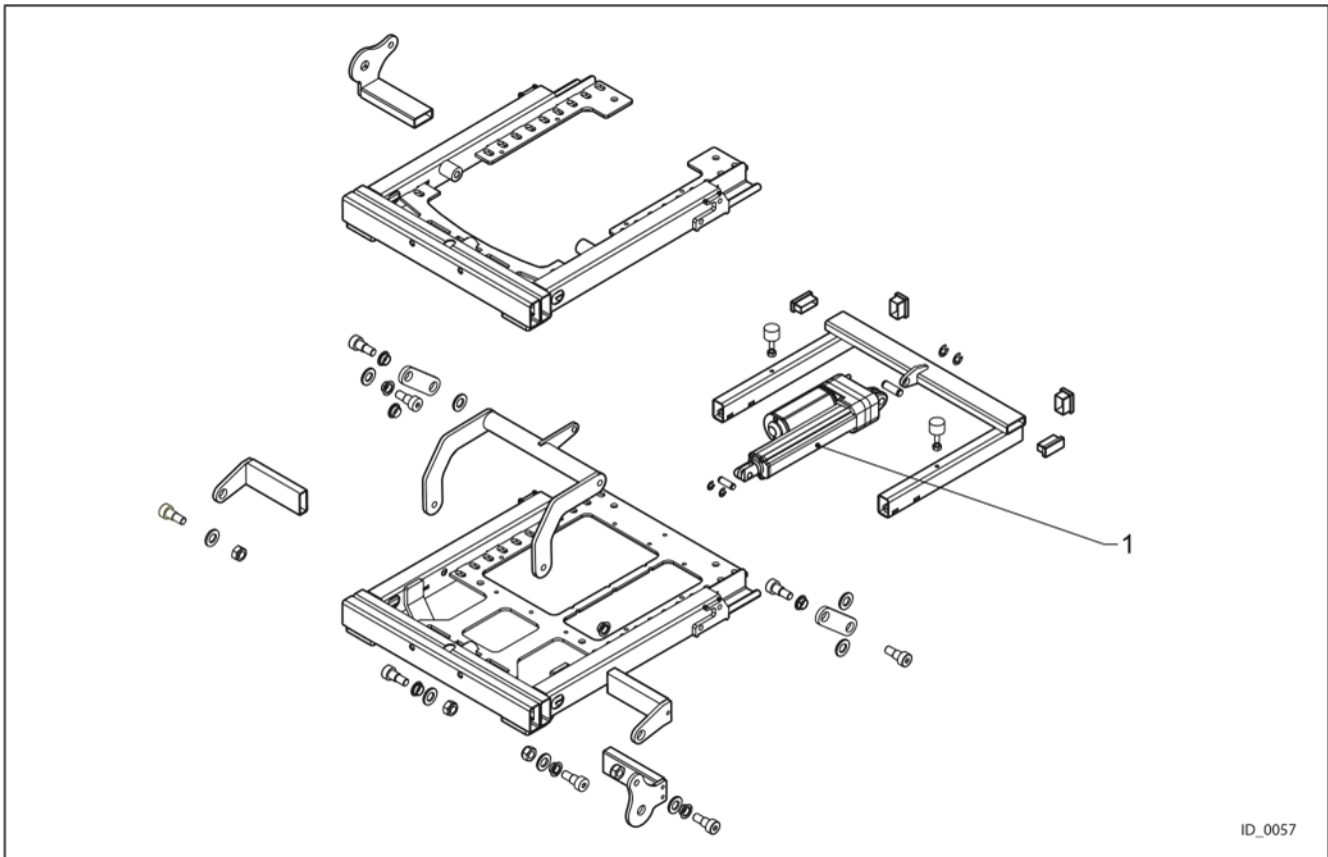


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0042	Actuator Aufstehhilfe

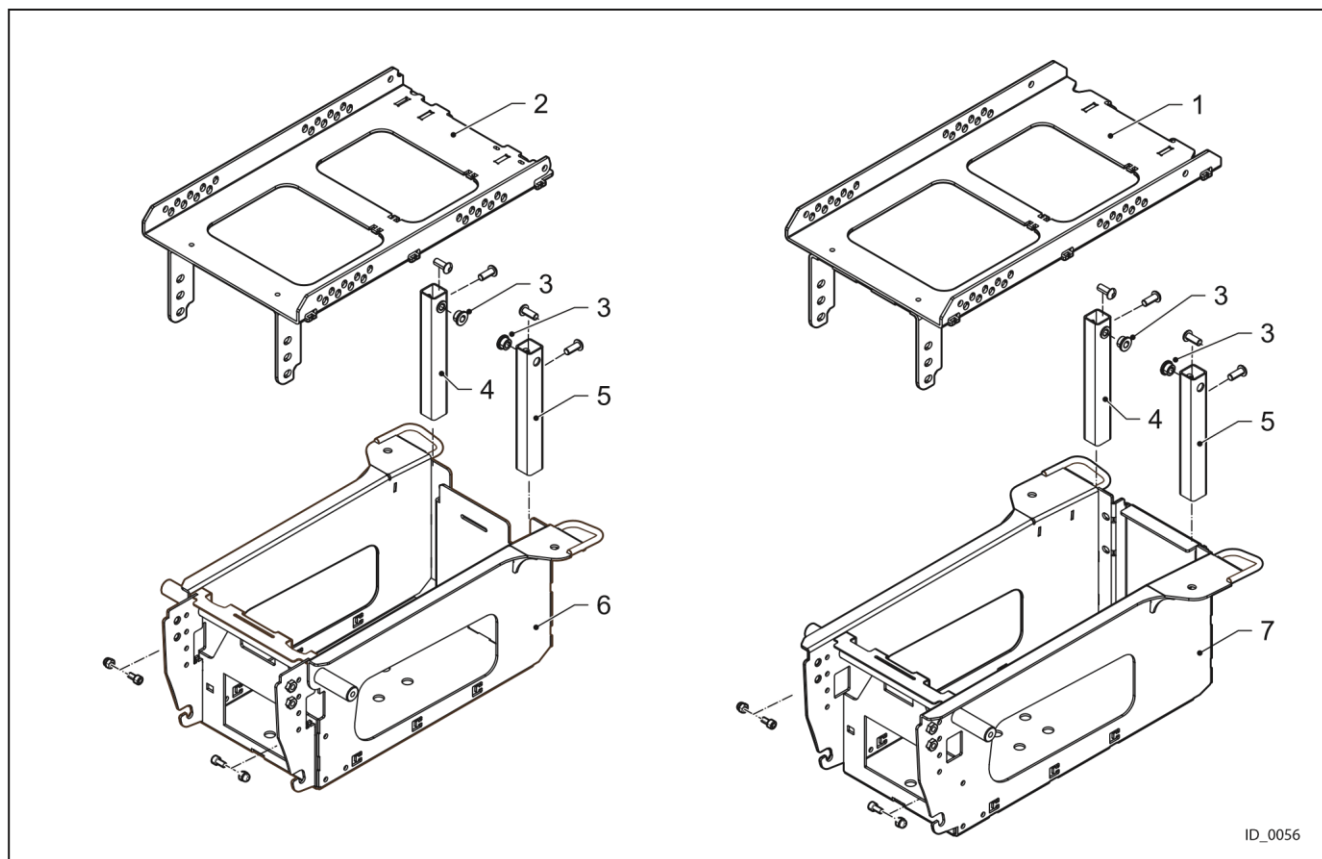


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0198	Interface Montageplatte, Standard Chassis
2	22X0199	Interface Montageplatte, Compact Chassis
3	22X0200	Distanz Hülze
4	22X0201-R	Höheneinstellungs Rohr, rechts
5	22X0201-L	Höheneinstellungs Rohr, links
6	22X0202-CC	Batteriekasten Compact Chassis
7	22X0202-SC	Batteriekasten Standard Chassis

Junior Sitz System

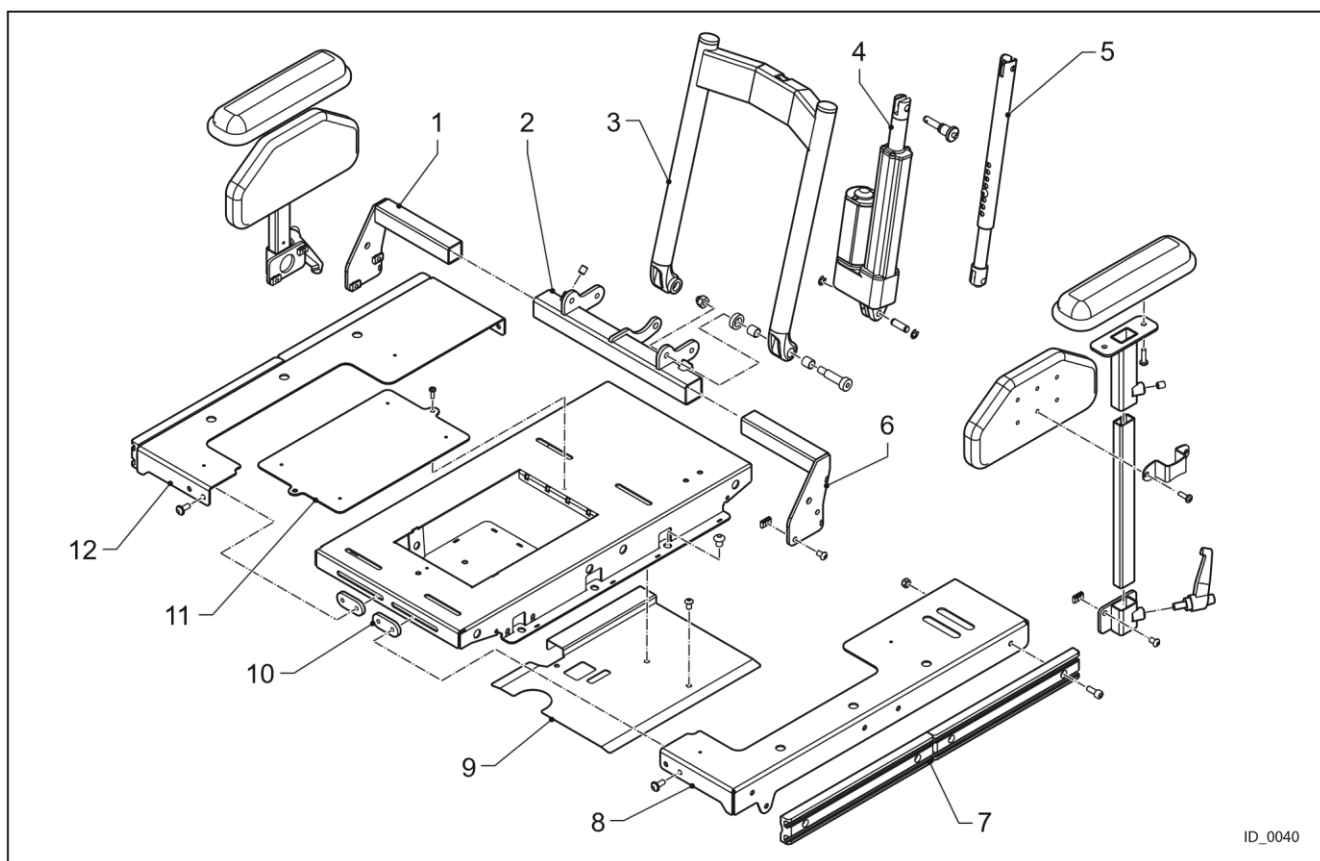

ID_0040


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0190-R	Rückenrahmen Montageaufnahme rechts, X10 Junior
2	22X0191	Rückenrahmen Montageaufnahme mitte, X10 Junior
3	22X0192	Rückenrahmen, X10 Junior
4	22X0193	Actuator Rückenwinkelverstellung X10 Junior
5	22X0077	Rückenwinkel manuell einstellbar
6	22X0190-L	Rückenrahmen Montageaufnahme links, X10 Junior
7	22X0062	Armlehnenmontageschiene (pro Stück)
8	22X0194-L	Verstellbare Sitzplatte links, X10 Junior
9	22X0195	Verkabelung Abdeckplatte, X10 Junior
10	22X0196	Klemmplatte M6
11	22X0197	Abdeckplatte
12	22X0194-R	Verstellbare Sitzplatte links, X10 Junior

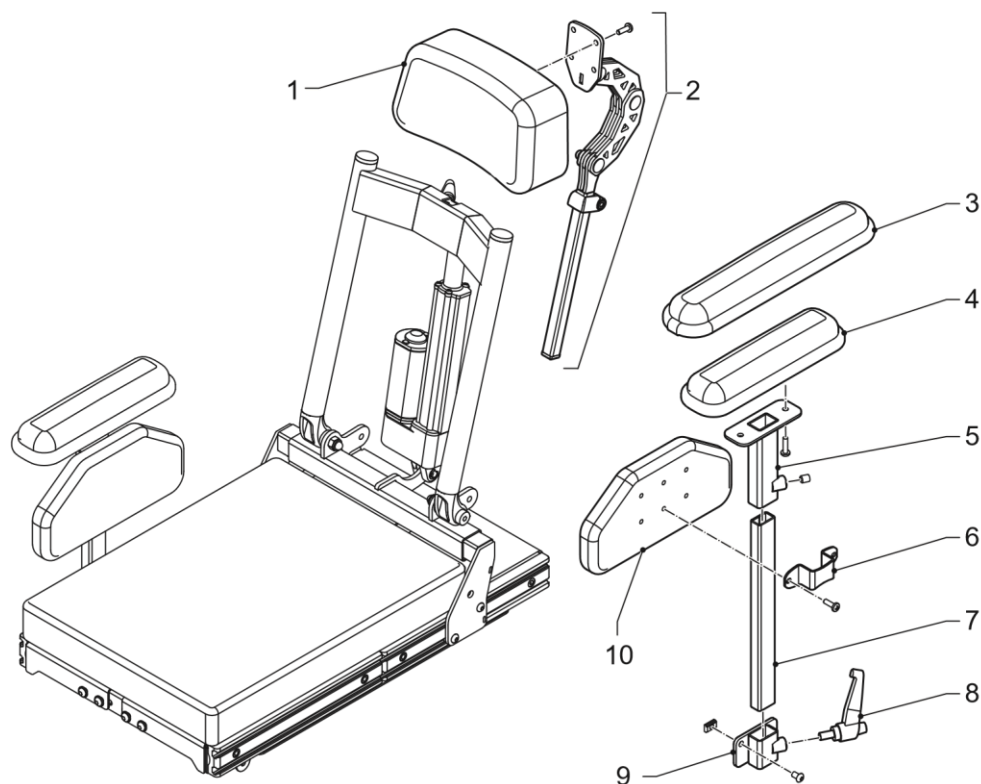

ID_0041


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0184	Kopfstützenpolster klein, X10 Junior
2	22X0079	Kopfstützenhalter X10, einstellbar
3	22X0185	Armlehnenpolster 30 cm, schmal, Kunstleder, X10-Junior
4	22X0186	Armlehnenpolster 22 cm, Kunstleder, X10-Junior
5	22X0187-L	Armlehnenmontagebracket oberer Teil, links, X10 Junior
5	22X0187-R	Armlehnenmontagebracket oberer Teil, rechts, X10 Junior
6	22X0188	Montage Bracket Seitenteil, X10 Junior
7	22X0189	Armlehnenmontagebracket unterer Teil, X10 Junior
8	22X0061	Kniehebelschraube M8
9	22X0171	Armlehnenmontagebracket Sitzrahmen, X10 Junior
10	22X0127	Oberschenkelpolster (pro Stück)

004-03-X10

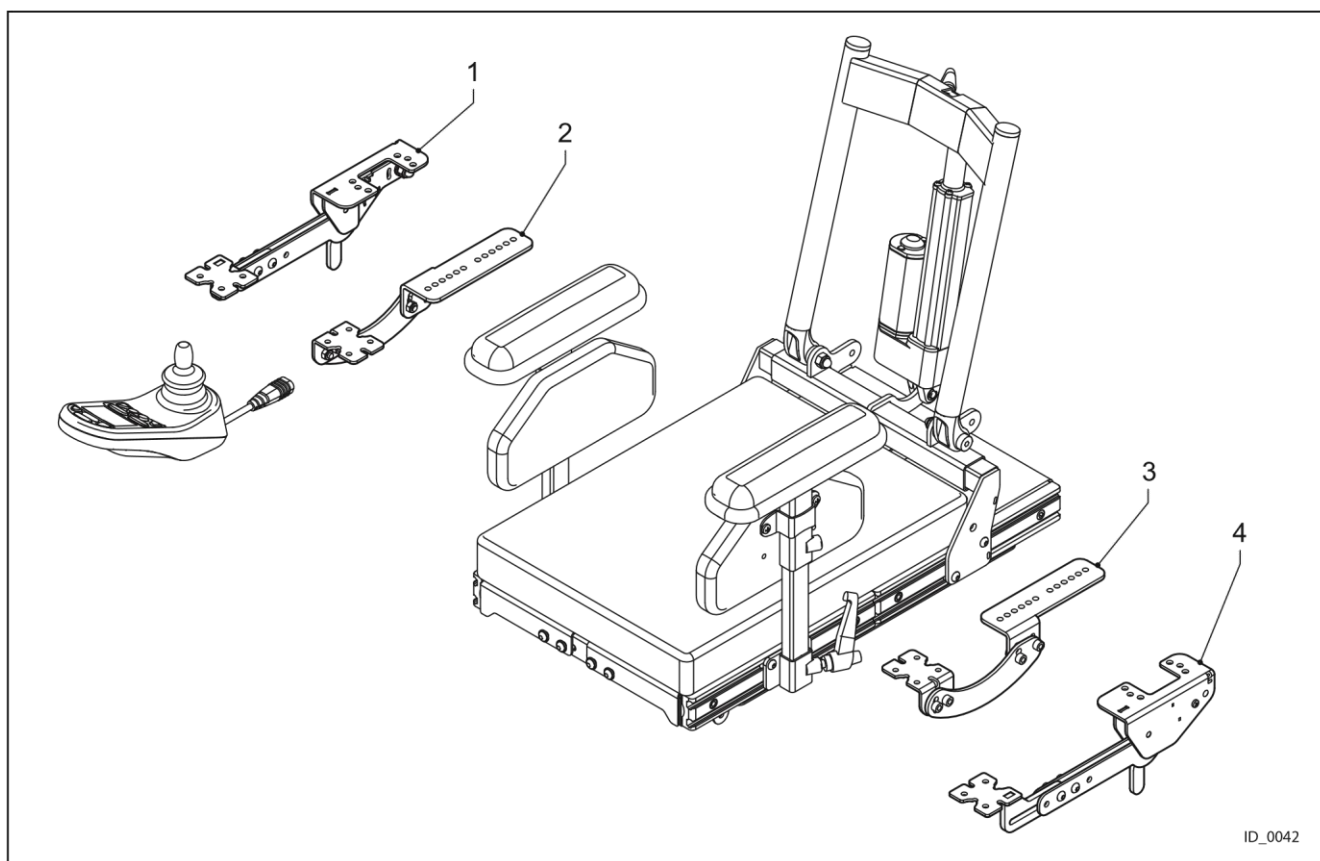Joystick Bracket Junior


ID_0042


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0114-R	Joystickaufnahme nach unten wegklappbar, rechts
2	22X0182	Joystickaufnahme rechts, fest, X10 Junior
3	22X0183	Joystickaufnahme links, fest, X10 Junior
4	22X0114-L	Joystickaufnahme nach unten wegklappbar, links

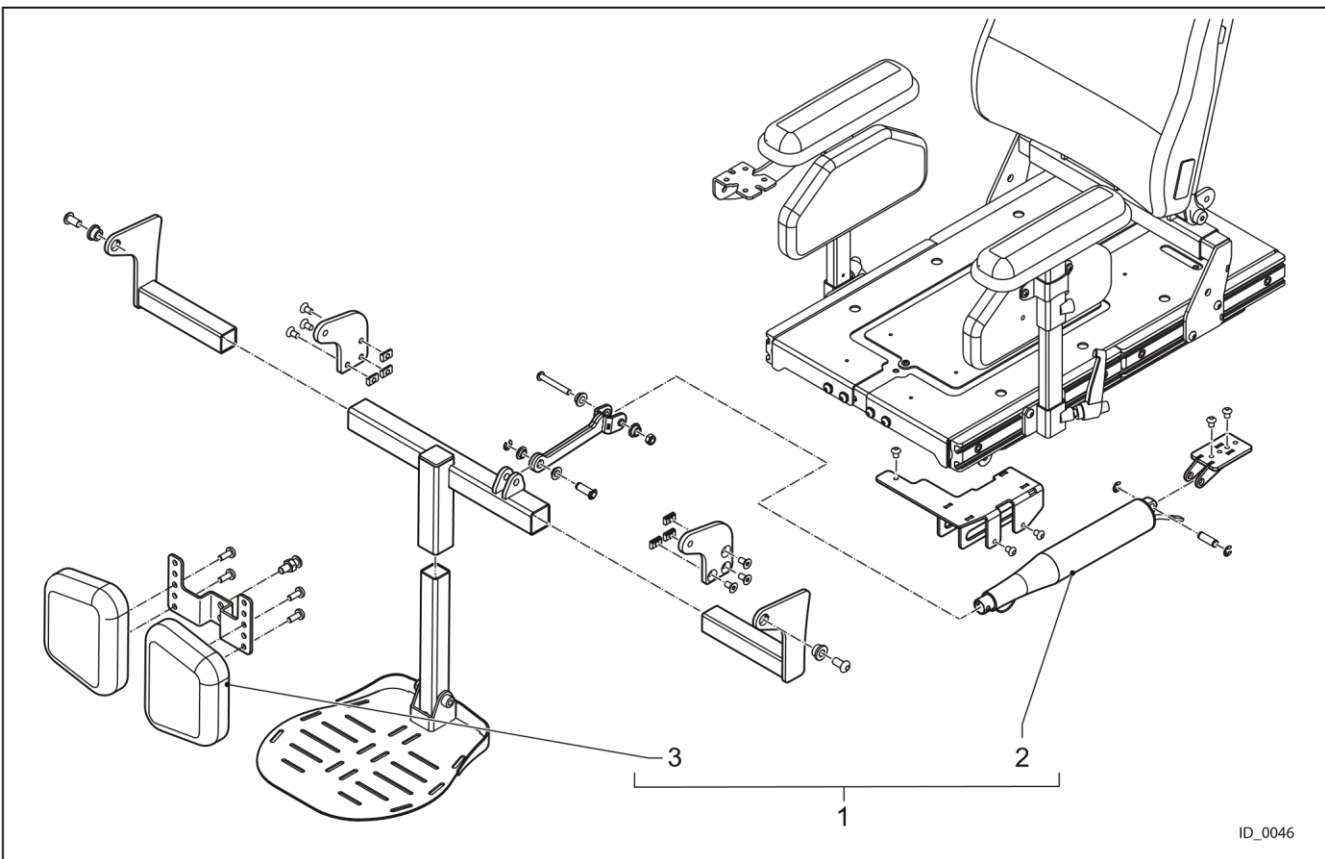

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0181	Zentrale Beinstütze, elektrisch verstellbar X10 Junior
2	22X0045	Actuator getrennte Beinstütze
3	22X0101	Wadenplatten zentrale Beinstütze (Set)

004-08-X10

Fixed Centre Mounted Legrest Junior

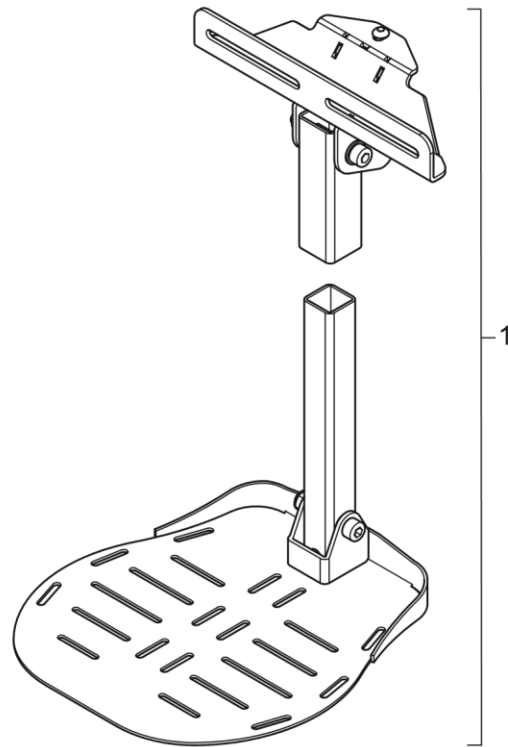


ID_0047

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0172	zentrale Beinstütze X10 Junior, fester Winkel

004-09-X10

Attendant Control Junior

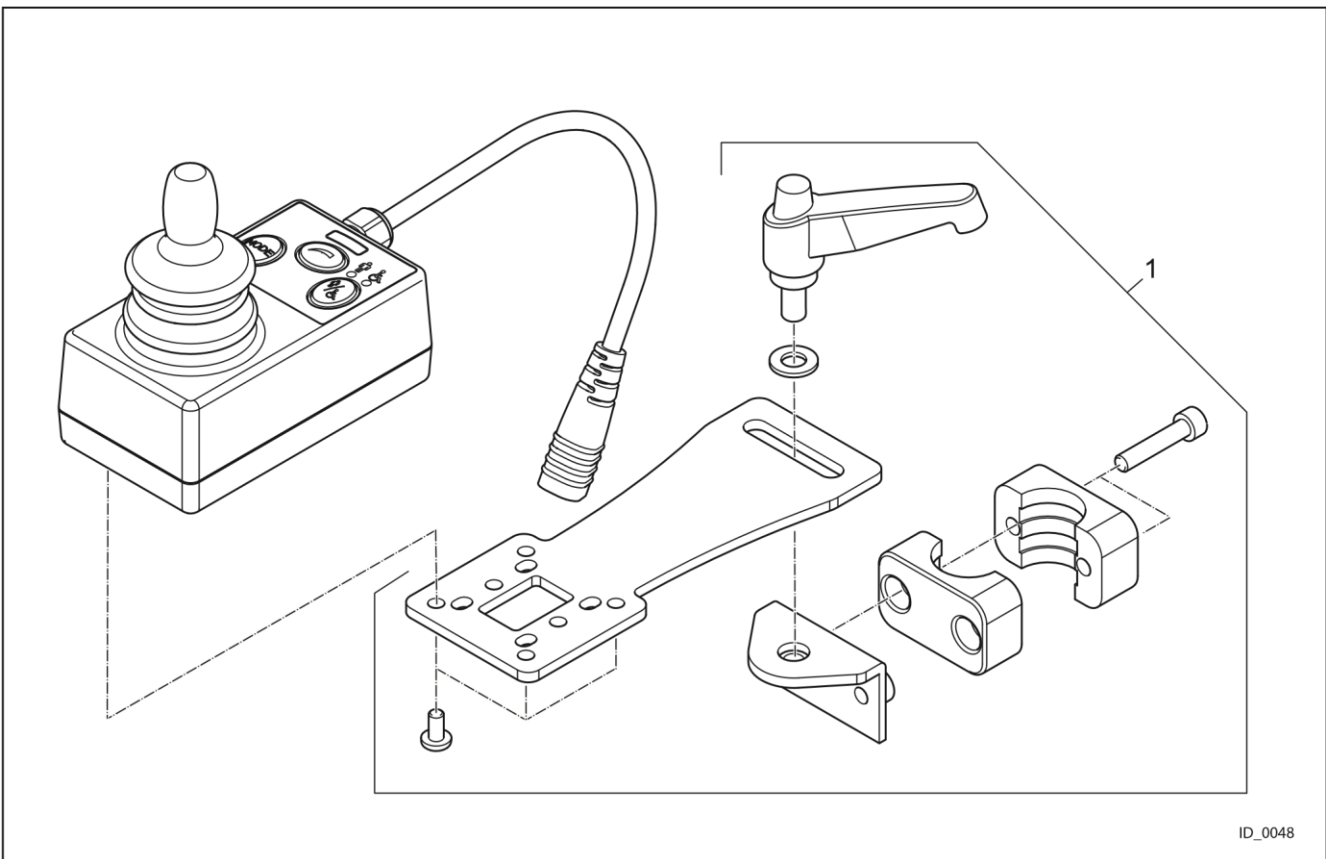

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	22X0180	Halterung Begleitersteuerung X10 Junior

R-Net Recline, Tilt, Lift & Powered Central Legrest, Lift (Gyro optional)

